



INSTRUÇÕES DE USO

Produto:

Catgut Cromado Agulhado ou sem Agulha Shalon

Fabricado e distribuído por:

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

Versão:

01



CATGUT CROMADO AGULHADO OU SEM AGULHA SHALON

DESCRIÇÃO

Os fios cirúrgicos de **Catgut Cromado Agulhado e sem Agulha - Shalon** são de origem animal, composto de colágeno, derivado da serosa proveniente do intestino de gado bovino, tratados com sais de cromo. Fio de aspecto homogêneo e multifilamentar torcido. Absorção prolongada devido ao tratamento especial com sais de cromo. Possui alta resistência e fácil manuseio. Retenção da força tênsil “in vivo” aproximadamente 21-28 dias. O período de absorção é de aproximadamente 60 dias, sendo absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. Reação tecidual moderada. Esterilizado por Cobalto. Classe IV.

APRESENTAÇÃO

Os fios cirúrgicos de **Catgut Cromado Agulhado ou sem Agulha - Shalon** possuem coloração marrom e são comercializados em caixas com 12 ou 24 envelopes, sendo que cada envelope contém 1 ou 3 fios de suturas, com ou sem agulha dependendo do item, no tamanho de 70, 75, 90 ou 150 cm. As agulhas cirúrgicas apresentam diversos tamanhos e curvaturas. O diâmetro dos fios varia segundo os números cirúrgicos de 6-0 a 4. O produto possui prazo de validade de 3 anos a partir da data de esterilização.

INDICAÇÕES

Os fios cirúrgicos de **Catgut Cromado Agulhado ou sem Agulha - Shalon** são indicados para aproximação e/ou ligadura de tecidos moles em geral, incluindo uso em procedimentos oftalmológicos, ginecológicos, obstétricos, gastrointestinais, tecidos friáveis e fechamento geral.



CONTRAINDICAÇÕES

Os fios cirúrgicos de **Catgut Cromado Agulhado e sem Agulha – Shalon** são contraindicados em cirurgias cardiovasculares e neurológicas.

INTRUÇÕES DE USO

Deve ser utilizado de acordo com o procedimento cirúrgico, sendo definido por critério médico o tamanho e diâmetro do fio de sutura e da agulha utilizados para cada tipo de intervenção cirúrgica.

CUIDADOS

- Este produto deve ser utilizado somente por cirurgiões treinados e com experiência em técnicas cirúrgicas;
- Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material;
- Usar técnicas assépticas;
- Produto estéril, a menos que a embalagem seja aberta ou danificada;
- O produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único;
- O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina;
- Não utilizar se a embalagem estiver molhada ou danificada;
- Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida;
- O produto uma vez extraído deve ser considerado lixo hospitalar de risco biológico;
- A empresa recomenda seguir o programa de gerenciamento de resíduos em caso de produto vencido ou avariado;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- PRODUTO DE USO ÚNICO;
- NÃO REESTERILIZAR;
- ESTÉRIL;
- DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.



CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- Recomenda-se armazenar o produto em temperatura de 20°C a 30°C e umidade relativa do ar entre 40 a 60%;
- Conservar os produtos ao abrigo da luz solar direta, livre de poeira, umidade intempéries, e em sua embalagem original;
- Transportar em veículos fechados que protejam o produto de sol e chuva.

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

CNPJ nº 33.348.467/0001-86

Endereço: Av. Hermógenes Coelho, 3523 – Alto da Boa Vista.

São Luís de Montes Belos – GO – CEP. 76056-000

Farmacêutica Responsável:

Kátia Regina do Nascimento Dias Policarpo - CRF-GO 11.307

Registro ANVISA nº: 10243410010

KATIA REGINA DO
NASCIMENTO DIAS
POLICARPO:016476
69103

Assinado de forma digital
por KATIA REGINA DO
NASCIMENTO DIAS
POLICARPO:01647669103
Dados: 2025.07.22
08:58:44 -03'00'

VENDAS

Av. C-255 Nº 270, Edifício Centro Empresarial Sebba,

Salas: 601/603 Nova Suíça – Goiânia – GO – CEP: 74280-010

SAC.: (62)98191-9111 Vendas: (62)3259-4546.

E-mail: vendas@suturas.com.br

Site: www.suturas.com.br