



INSTRUÇÕES DE USO

Produto:

Fio de Sutura De Poliéster Agulhada Shalon

Fio de Poliéster Trançado Shalon

Fabricado e distribuído por:

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

Versão:

01



FIO DE SUTURA DE POLIESTER AGULHADA SHALON

FIO DE POLIESTER TRANÇADO SHALON

DESCRIÇÃO

Os fios cirúrgicos de **Poliéster Agulhado e sem Agulha** são de origem sintética, fabricados com fio multifilamentar não absorvível do Polímero Tereftalato de Etileno, cujas fibras são trançadas e revestidas com silicone. É um material biocompatível, de resistência e manuseio excelentes. Não foi identificada alteração significativa na resistência tensil “in vivo”. Reação tecidual inflamatória aguda mínima. Não absorvível. Esterilizado por Óxido de Etileno. Classe IV.

APRESENTAÇÃO

Os fios cirúrgicos de **Poliéster Agulhado e sem Agulha** possuem coloração verde e são comercializados em caixas com 12 ou 24 envelopes, sendo que cada envelope contém 1, 4 ou 15 fios de sutura, com ou sem agulha dependendo do item, no tamanho de 45 cm ou 75 cm. As agulhas cirúrgicas apresentam diversos tamanhos e curvaturas. O diâmetro dos fios varia segundo os números cirúrgicos de 4-0 a 5. O produto possui prazo de validade de 5 anos a partir da data de esterilização.

INDICAÇÕES

Os fios cirúrgicos de **Poliéster Agulhado e sem Agulha** são indicados para aproximação e/ou ligadura de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos gastrointestinais, cardiovasculares e ortopédicos.



CONTRAINDICAÇÕES

Os fios cirúrgicos **Poliéster Agulhado e sem Agulha** são contraindicados em procedimentos onde houver contato prolongado com soluções salinas.

INSTRUÇÕES DE USO

Deve ser utilizado de acordo com o procedimento cirúrgico, sendo definido por critério médico o tamanho e diâmetro do fio de sutura e da agulha utilizados para cada tipo de intervenção cirúrgica.

CUIDADOS

- Este produto deve ser utilizado somente por cirurgiões treinados e com experiência em técnicas cirúrgicas;
- Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material;
- Usar técnicas assépticas;
- Produto estéril, a menos que a embalagem seja aberta ou danificada;
- O produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único;
- O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina;
- Não utilizar se a embalagem estiver molhada ou danificada;
- Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida;
- O produto uma vez extraído deve ser considerado lixo hospitalar de risco biológico;
- A empresa recomenda seguir o programa de gerenciamento de resíduos em caso de produto vencido ou avariado;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- PRODUTO DE USO ÚNICO;
- NÃO REESTERILIZAR;
- ESTÉRIL;
- DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.



CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- Recomenda-se armazenar o produto em temperatura de 20°C a 30°C e umidade relativa do ar entre 40 a 60%;
- Conservar os produtos ao abrigo da luz solar direta, livre de poeira, umidade intempéries, e em sua embalagem original;
- Transportar em veículos fechados que protejam o produto de sol e chuva.

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

CNPJ nº 33.348.467/0001-86

Endereço: Av. Hermógenes Coelho, 3523 – Alto da Boa Vista.

São Luís de Montes Belos – GO – CEP: 76056-000

Farmacêutica Responsável:

Kátia Regina do Nascimento Dias Policarpo - CRF-GO 11.307

Registro ANVISA nº: 10243410023 (Poliéster Agulhado) / 10243410026 (Poliéster sem Agulha).

KATIA REGINA DO
NASCIMENTO DIAS
POLICARPO:0164766
9103

Assinado de forma digital por
KATIA REGINA DO
NASCIMENTO DIAS
POLICARPO:01647669103
Dados: 2025.07.22 09:00:55
-03'00"

VENDAS

Av. C-255 Nº 270, Edifício Centro Empresarial Sebba,

Salas: 601/603 Nova Suíça – Goiânia – GO – CEP: 74280-010

SAC.: (62)98191-9111 Vendas: (62)3259-4546.

E-mail: vendas@suturas.com.br

Site: www.suturas.com.br