



## **INSTRUÇÕES DE USO**

**Produto:**

Fio de Polipropileno Agulhado - Shalon

**Fabricado e distribuído por:**

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

**Versão:**

01



## **FIO DE POLIPROPILENO AGULHADO - SHALON**

### **DESCRIÇÃO**

Os fios cirúrgicos de **Polipropileno Agulhado - Shalon** são de origem sintética, fabricados a partir da extrusão do polímero de polipropileno. É um material biologicamente compatível, bem tolerado pelo organismo, monofilamentar, de alta resistência tênsil e fácil manuseio. Não sujeito à degradação ou enfraquecimento pela ação de enzimas teciduais. Reação inflamatória aguda mínima. Não absorvível. Esterilizado por Óxido de Etileno. Classe IV.

### **APRESENTAÇÃO**

Os fios cirúrgicos de **Polipropileno Agulhado – Shalon** possuem coloração azul e são comercializados em caixas com 24 envelopes, sendo que cada envelope contém 1 fio de sutura agulhada no tamanho de 45,50,75 ou 90 cm, encastoadada em uma ou ambas extremidades do fio cirúrgico. As agulhas cirúrgicas apresentam diversos tamanhos e curvaturas. Os diâmetros dos fios variam segundo os números cirúrgicos de 7-0 a 2. O produto possui prazo de validade de 5 anos a partir da data de esterilização.

### **INDICAÇÕES**

Os fios cirúrgicos de **Polipropileno Agulhado - Shalon** são indicados para aproximação e/ou ligadura de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, gastrointestinais, cuticulares, ginecológicos e obstétricos.

### **CONTRAINDICAÇÕES**

Os fios cirúrgicos de **Polipropileno Agulhado - Shalon** são contraindicados em procedimentos onde houver contato prolongado com soluções salinas.



## **INTRUÇÕES DE USO**

Deve ser utilizado de acordo com o procedimento cirúrgico, sendo definido por critério médico o tamanho e diâmetro do fio de sutura e da agulha utilizados para cada tipo de intervenção cirúrgica.

## **CUIDADOS**

- Este produto deve ser utilizado somente por cirurgiões treinados e com experiência em técnicas cirúrgicas;
- Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material;
- Usar técnicas assépticas;
- Produto estéril, a menos que a embalagem seja aberta ou danificada;
- O produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único;
- O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina;
- Não utilizar se a embalagem estiver molhada ou danificada;
- Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida;
- O produto uma vez extraído deve ser considerado lixo hospitalar de risco biológico;
- A empresa recomenda seguir o programa de gerenciamento de resíduos em caso de produto vencido ou avariado;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- PRODUTO DE USO ÚNICO;
- NÃO REESTERILIZAR;
- ESTÉRIL;
- DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.

## **CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE**

- Recomenda-se armazenar o produto em temperatura de 20°C a 30°C e umidade relativa do ar entre 40 a 60%;
- Conservar os produtos ao abrigo da luz solar direta, livre de poeira, umidade intempéries, e em sua embalagem original;



- Transportar em veículos fechados que protejam o produto de sol e chuva.

#### **FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR**

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

CNPJ nº 33.348.467/0001-86

Endereço: Av. Hermógenes Coelho, 3523 – Alto da Boa Vista.

São Luís de Montes Belos – GO – CEP. 76056-000

Farmacêutica Responsável:

Kátia Regina do Nascimento Dias Policarpo - CRF-GO 11.307

Registro ANVISA nº: 10243410014

KATIA REGINA DO  
NASCIMENTO DIAS  
POLICARPO:016476  
69103

Assinado de forma digital por  
KATIA REGINA DO  
NASCIMENTO DIAS  
POLICARPO:01647669103  
Dados: 2025.07.22 08:57:03  
-03'00'

#### **VENDAS**

Av. C-255 Nº 270, Edifício Centro Empresarial Sebba,

Salas: 601/603 Nova Suíça – Goiânia – GO – CEP: 74280-010

SAC.: (62)98191-9111 Vendas: (62)3259-4546.

E-mail: vendas@suturas.com.br

Site: www.suturas.com.br