



Bolsas de colostomia Vitalgold

vitalGold

Indicações de uso

A Bolsa de colostomia Vitalgold tem a finalidade de desviar o trânsito do conteúdo intestinal, seja devido a doenças que não permitam a permanência do ânus ou de todo o cólon e reto, como câncer, retocolite ulcerativa ou polipose adenomatosa familiar ou de forma temporária em casos que não seja possível realizar uma anastomose intestinal definitiva, ou mesmo para proteger uma anastomose de risco.

Bolsa para colostomia placa fixa

Nome da Empresa	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A		
CNPJ	78.742.491/0001-33	Autorização	1.02.969-0
Produto	BOLSAS COLETORAS PARA ESTOMAS VITAL GOLD		
Modelo Produto Médico			
BOLSA PARA COLOSTOMIA COM PLACA FIXA FECHADA			
Codigos: 4001 - 4002 - 4003 - 4004 - 4013 - 4014 - 4015 - 4004TF - 4015TF - 4016TF			
BOLSA PARA COLOSTOMIA COM PLACA FIXA DRENAVEL			
Codigos: 4005 - 4006-07 - 4012 - 4008 - 4009 - 4012 - 4080 - 40904005TC - 4006-07TC - 4012TC - 4008TC - 4009TC - 4012TC - 4080TC - 4090TC4005V - 4006-07V - 4012V - 4080V - 4008V - 4009V - 4090V4005TV - 4006-07TV - 4012TV - 4080TV - 4008TV - 4009TV - 4090TV40051 - 4006-071 - 40071 - 40121 - 40801T - 40901T4005ITT - 4006-07ITT - 4012ITT - 40801TT - 40901TT4005T - 4006 -07T - 4007T - 4008T - 4009T - 4012T - 4080T - 409074005TT - 4006-07TT - 4008TT - 4009TT - 4012TT - 4070TT - 4080TT - 4090TT4014/4015 - 4014/4015TC - 4014/4015BV			
ACESSÓRIOS			
Codigos: 4049 - 4057 - 4056 - 4051 - 4053 - 4047 - 4048			
Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão	
Nenhum Arquivo Encontrado(a)			
Nome Técnico	Bolsas Coletoras		
Registro	10296900140		
Processo	25351.428144/2014-61		
Fabricante Legal	• FABRICANTE: ZHEJIANG KANG LI DI MEDICAL ARTICLES CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR		
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro	VIGENTE		
Registro Anvisa 10296900140			

Bolsa para colostomia placa removível

Nome da Empresa	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A		
CNPJ	78.742.491/0001-33	Autorização	1.02.969-0
Produto	BOLSAS COLETORAS PARA ESTOMAS PLACA REMOVIVEL VITAL GOLD		
Modelo Produto Médico			
BOLSA PARA COLOSTOMIA COM PLACA REMOVIVEL FECHADACódigos: 4016 - 4017 - 4018 - 4019 - 4016TF - 4017TF - 4018TF - 4019TF - 4014F - 40140F - 4014TFBOLSA PARA COLOSTOMIA COM PLACA REMOVIVEL DRENAVELCódigos: 4020 - 4021 - 4022 - 4023 - 4024 - 4020TC - 4021TC - 4022TC - 4023TC - 4024TC4020V - 4021V - 4022V - 4023V - 4024V - 4020TV - 4021TV - 4022TV - 4023TV - 4024TV4020T - 4021T - 4022T - 4023T - 4024T - 4020TT - 4021TT - 4022TT - 4023TT - 4024TT4014V - 40140V - 4014TVPLACASCódigos: 4026 - 4027 - 4028 - 4032 - 40334029 - 4030 - 4031 - 4034 - 40354061 - 4062 - 4063 - 40644065 - 4066 - 4067 - 4068ACESSÓRIOSCódigos: 4047 - 4048 - 4050 - 4051 - 4053 - 4049 - 4056 - 4057			
Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão	
Nenhum Arquivo Encontrado(a)			
Nome Técnico	Bolsas Coletoras		
Registro	10296900149		
Processo	25351.168872/2016-79		
Fabricante Legal	• FABRICANTE: ZHEJIANG KANG LI DI MEDICAL ARTICLES CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR		
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro	VIGENTE		
Registro Anvisa 10296900149			



JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda.
R. Wilson Lois Koehler Júnior 406 | CEP 81630-280 | Xaxim | Curitiba - PR | Brasil
contato@joaoemed.com.br | +55 41 2108 4545 | Fax: +55 41 2108 4522
www.joaoemed.com.br



Bolsas de colostomia Vitalgold

vitalGold

Características do produto

As **Bolsas coletoras Vitalgold** são hipoalergênicas, responsáveis pela coleta dos resíduos do corpo eliminados através do estoma.

Bolsa: As Bolsas são constituídas por 05 camadas plásticas, podendo ser de uma peça com placa fixa ou de duas peças placa móvel aberta ou fechada.

Placas: As placas são de 3 hidrocolóides CMC (Carboximetilcelulose sódica + pectina e gelatina) adesivo, com bordas adesivas de micropore e ou com borda em filme de poliuretano transparente que protegem a integridade da pele ao redor do estoma, especialmente importante para pacientes de pele sensível e ao mesmo tempo que mantem a bolsa firmemente posicionada. Possuem orifício inicial pré-cortado de 10 mm que pode ser ampliado até no máximo de 80 mm para acomodar estomas de vários formatos e tamanhos. Confeccionadas em hidrocoloide (carboximetilcelulose sódica e poli-isobutileno), camada externa de filme de poliuretano e anel de fixação em polietileno.

Fechamento

As bolsas drenáveis possuem os seguintes modelos para fechamento: Clamp, V elcro e Twist projetados para uso seguro.

Acessórios

Placa plana, clamp em polietileno, cinto(40cm a 120cm com elástico, fivela para ajuste e fecho plástico, podendo alargar-se até 160 cm), filtro de carvão ativado 30% polietileno e 70% viscoso) e guia de medidas de abertura de estomas.

Modelos disponíveis em estoque


- **4009T** Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, borda em adesivo microporoso, filtro e fechamento twist.
- **4009TT** Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, com borda em adesivo microporoso, filtro e fechamento twist (transparente).
- **4080T** Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, filtro e fechamento twist.
- **4080IT** Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, com borda em adesivo microporoso, filtro, abertura para irrigação e fechamento twist.
- **4070T** Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, filtro e fechamento twist.
- **4006-07T** Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, filtro e fechamento twist.
- **4012T** Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, filtro e fechamento twist.
- **4005T** Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, filtro e fechamento twist.
- **4006-07** Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, filtro e fechamento clamp (contém 20 bolsas e 5 clamps).
- **4014** Bolsa de colostomia infantil drenável com barreira de pele hidrocoloide, filtro e fechamento clamp (contém 20 bolsas e 5 clamps).
- **4009** Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, borda em adesivo microporoso, filtro e fechamento com clamp (contém 20 bolsas e 5 clamps).
- **4064** Placa plana para bolsa de colostomia convexa com barreira de pele hidrocoloide e borda em adesivo microporoso.
- **4020T** Bolsa de colostomia drenável com filtro e fechamento twist - (Encaixe para placa de 50mm).
- **4029** Placa plana para bolsa de colostomia com barreira de pele hidrocoloide e borda em adesivo microporoso (Recorte de 50mm).
- **4021T** Bolsa de colostomia drenável com filtro e fechamento twist - (Encaixe para placa de 65mm).
- **4030** Placa plana para bolsa de colostomia com barreira de pele hidrocoloide e borda em adesivo microporoso(Recorte de 65mm).
- **4022T** Bolsa de Colostomia drenável com filtro e fechamento twist - (encaixe para placa de 70mm)
- **4031** Placa plana para bolsa de Colostomia com barreira de pele hidrocoloide e borda em adesivo microporoso (recorte de 70 mm).
- **4006-07V** Bolsa de colostomia drenável com barreira de pele hidrocoloide, filtro e fechamento em velcro.
- **4004** Bolsa de colostomia, peça fechada com filtro, barreira de pele adesiva hidrocoloide.
- **4056** Clamp para bolsa coletora de estomas.
- **4050** Cinto para bolsa coletora de estomas.
- **Kit** Bolsa de Colostomia drenável com filtro e fechamento twist 4020T e placa plana 4029(Recorte de 50mm).
- **Kit** Bolsa de Colostomia drenável com filtro e fechamento twist 4021T e placa plana 4030(Recorte de 65mm).
- **Kit** Bolsa de Colostomia drenável com filtro e fechamento twist 4022T e placa plana 4031(Recorte de 70mm).
- **Kit 2** Bolsas de Colostomia drenável com filtro e fechamento twist 4022T e placa plana 4031(Recorte de 70mm).




JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda.
R. Wilson Lois Koehler Júnior 406 | CEP 81630-280 | Xaxim | Curitiba - PR | Brasil
contato@joamed.com.br | +55 41 2108 4545 | Fax: +55 41 2108 4522
www.joamed.com.br




Instruções de uso

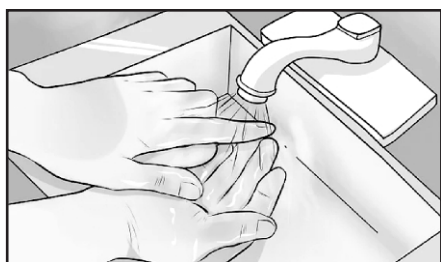


1- Lave as mãos cuidadosamente com água e sabão.

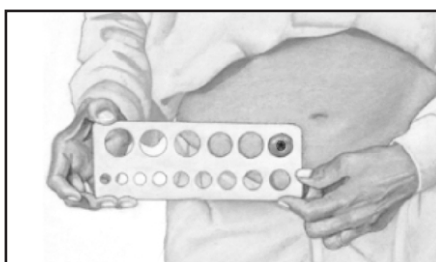


2- A medida certa do recorte da placa é aquela que cobre toda a pele e deixa livre a colostomia, aproximadamente 1~1,5mm maior que o estoma. Esta medida pode variar ao longo do tempo. Com auxílio do guia, realize a medida do estoma e marque a placa de acordo com o diâmetro do guia.

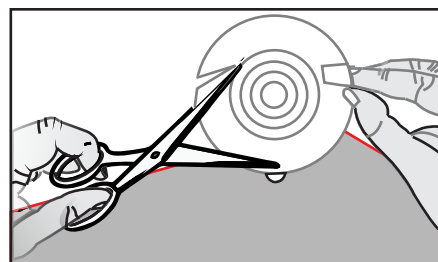


3- Recorte com uma tesoura de ponta arredondada o adesivo da placa do tamanho do estoma, cuidando para não perfurar a parte de trás da bolsa.

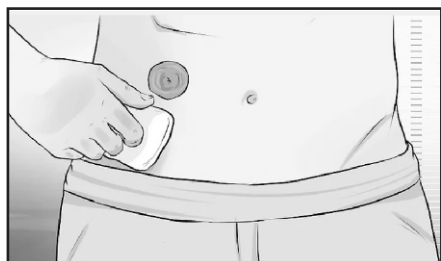


4- Limpe cuidadosamente a área do estoma conforme instruções fornecidas pelo médico responsável do paciente, preferencialmente com água morna ou solução salina. Coloque uma gaze no estoma para prevenir que vaze no momento que estiver aplicando a placa.

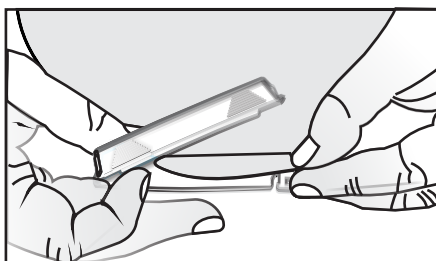


5- Se a bolsa for do tipo drenável, utilize o clamp para fechamento seguro, fechando a bolsa de colostomia.

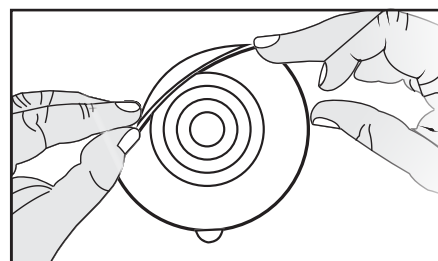


6- Retire o papel protetor da placa.

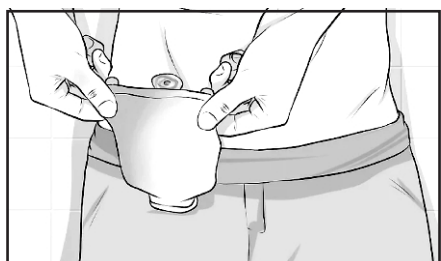

7- Coloque a placa sobre a pele na área do estoma com as duas mãos, pressionando a placa de baixo para cima e certificando-se de que bolsa esteja completamente aderida na pele.
(Bolsa de Colostomia Placa Fixa).

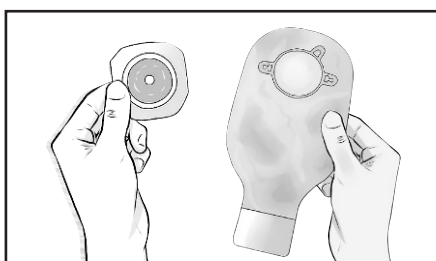

8- (Procedimento para bolsas coletoras de estomas Placa removível VitalGold). Coloque o anel de plástico da bolsa no anel da placa e pressione os dentes com os dedos de baixo para cima. O clique audível confirma o encaixe da placa na bolsa. Verifique se ficou bem encaixado.

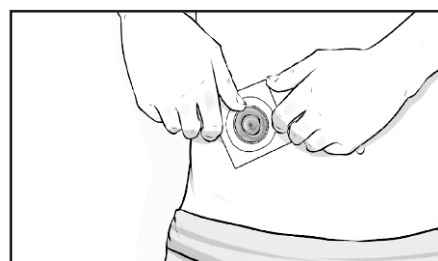


9- Quando for remover a placa, pressione a pele com uma mão e com a outra remova gentilmente para não machucar a pele. Caso encontre dificuldade, umedeça com água por alguns minutos e remova.



Instruções de uso



10 - Esvazie a bolsa de colostomia no banheiro. Abra o fundo da bolsa sobre o vaso sanitário. Se houver fezes, comprima com cuidado o conteúdo para fora.

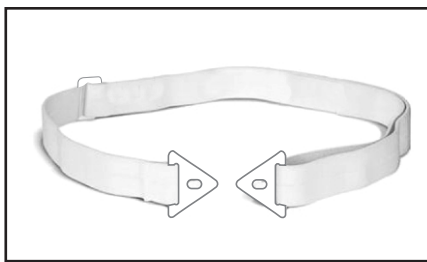

11 - Quando for utilizar a bolsa com o cinto, encaixe uma extremidade do cinto a presilha das bolsas. Passe o cinto ao redor da cintura e encaixe a outra extremidade do cinto a presilha correspondente. Ajuste o comprimento do cinto ao redor da cintura de forma que proporcione segurança e conforto ao usuário.

Atenção

- A frequência com que será necessário trocar a bolsa varia de acordo com o paciente e pode depender do tipo de bolsa utilizada.

- Pacientes com bolsa de uma peça, precisarão trocá-la inteira todas as vezes. Mas os pacientes que usam bolsa de duas peças podem trocar a bolsa com a frequência desejada. A placa só precisará ser trocada a cada dois ou três dias.

- Nunca passe mais do que sete dias sem trocar a bolsa de colostomia e seus acessórios.

- Siga sempre as instruções específicas do seu médico ou enfermeira sobre a frequência com que deve trocar sua bolsa de colostomia.

Composição

As bolsas são confeccionadas em plástico macio de filme coextrusado EVA de espessura 0,071 ~ 0,081mm, envolvidas em falso tecido de 45g/m² de coloração opaca, com filtro de carvão ativado à prova de odores.

As placas são de 3 hidrocolóides CMC (Carboximetilcelulose sódico + pectina e gelatina) adesivo, com bordas adesivas de micropore e ou com borda em filme de poliuretano transparente que protegem a integridade da pele ao redor do estoma, especialmente importante para pacientes de pele sensível e ao mesmo tempo que mantem a bolsa firmemente posicionada.

Os acessórios:

- Clamp em polietileno.
- Cinto com 40cm a 120cm com elástico.
- Fivela para ajuste e fecho plástico, podendo alargar-se até 160 cm), filtro de carvão ativado 30% polietileno e 70% viscoso)

Advertências e precauções

- Artigo hospitalar de pronto uso.
- Produto não esterilizado.
- Fabricante recomenda uso único
- Leia as instruções antes de usar.
- O produto deverá ser utilizado imediatamente após a abertura da embalagem.
- Não utilize a mesma placa barreira por período superior a sete dias.
- Respeitar sempre o prazo de validade.
- Se a embalagem estiver violada, molhada, dobrada, danificada ou rasgada, não utilizar o produto.

Validade

- 5 anos após a data de fabricação.



Armazenamento, conservação e transporte

Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar. Deverão estar protegidos e livres de umidade e batidas.

- Estocar em local seco e arejado.
- Proteger do calor (temperatura inferior a 30C°).
- Proteger da umidade (inferior a 80%).
- Proteger da luz (solar ou artificial potente).
- Acondicionar em caixa de papelão.

Imagens dos produtos

Modelo 4020T



Acoplamento de encaixe da placa 50mm

Encaixe para o cinto


Drenável com fechamento Twist



Filtro de carvão ativado a prova de odores

Confeccionada em plástico macio e silencioso, envolvido em falso tecido de coloração opaca com abertura para melhor visualização do aspecto dos resíduos


Modelo 4029

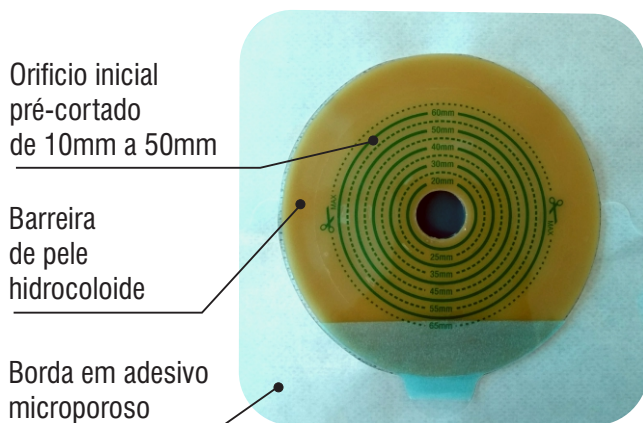

Orifício inicial pré-cortado de 10mm a 50mm

Barreira de pele hidrocoloide

Borda em adesivo microporoso

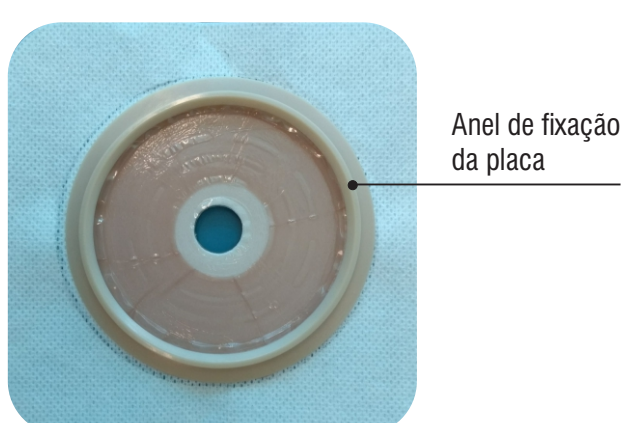

Anel de fixação da placa



Imagens dos produtos

Modelo 4021T

Acoplamento de encaixe da placa 65mm

Encaixe para o cinto

Drenável com fechamento Twist



Filtro de carvão ativado a prova de odores

Confeccionada em plástico macio e silencioso, envolvido em falso tecido de coloração opaca com abertura para melhor visualização do aspecto dos resíduos




Modelo 4030


Orifício inicial pré-cortado de 10mm a 65mm

Barreira de pele hidrocoloide

Borda em adesivo microporoso

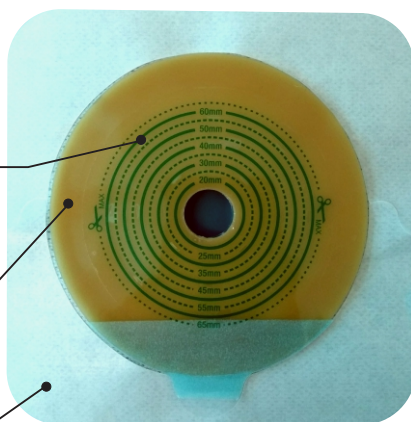

Anel de fixação da placa

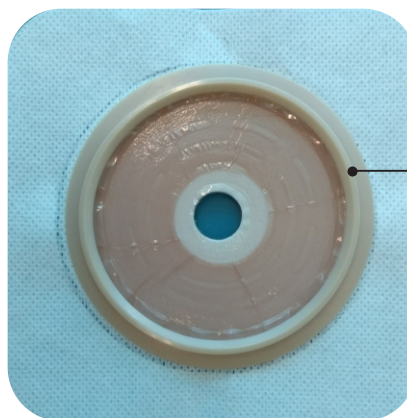



Imagens dos produtos

Modelo 4022T

Acoplamento de encaixe da placa 70mm

Encaixe para o cinto

Drenável com fechamento Twist



Filtro de carvão ativado a prova de odores

Confeccionada em plástico macio e silencioso, envolvido em falso tecido de coloração opaca com abertura para melhor visualização do aspecto dos resíduos




Modelo 4031


Orifício inicial pré-cortado de 10mm a 70mm

Barreira de pele hidrocoloide

Borda em adesivo microporoso

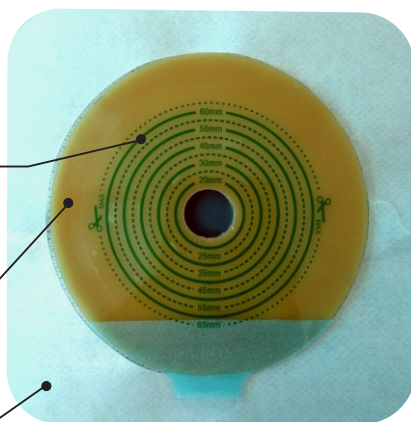

Anel de fixação da placa

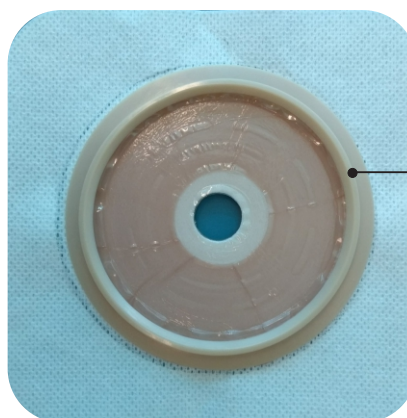



Bolsas de colostomia Vitalgold

vitalGold

Embalagens

Kit Bolsa + Placa

Embalagem primária em plástico com 1 bolsa e 1 placa, 2 bolsas e 1 placa ou 2 bolsas e 2 placas. As placas tem diferentes tamanhos de recortes.

Embalagem de transporte em papelão ondulado com 100 unidades ou 200 unidades do Kit.

Embalagens



Embalagem primária Kit - Bolsa + Placa
1 unidade



Embalagem transporte Kit
100 unidades ou 200 unidades

Importado e distribuído por

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A.

Rua Alcino Guanabara, 2500 - Hauer | CEP 81630-190 | Curitiba - PR | Brasil

CNPJ 78.742.491/0001-33



JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda.
R. Wilson Lois Koehler Júnior 406 | CEP 81630-280 | Xaxim | Curitiba - PR | Brasil
contato@joaomed.com.br | +55 41 2108 4545 | Fax: +55 41 2108 4522
www.joaomed.com.br