



**Imbrasul**  
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

## **FICHA TÉCNICA**

### **BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA INTEGRADA ABERTA – OPACA ou TRANSPARENTE SISTEMA DE UMA PEÇA**

Com placa integrada.  
Com adesivo microporoso removível.  
Bolsa OPACA com forro de TNT perfurado.  
Sistema aberto – drenável  
Pré-cortada em 19mm.  
Recortável de 25 a 70mm.  
20 unidades na embalagem.  
5 cliques anatômicos por caixa.  
Com filtro de carvão ativado.  
Acompanha REGUA de medida da abertura do estoma.

Registro na Anvisa: 80622660007

Validade de 5 anos

## **IMAGENS**



**PRODUTO**



**EMBALAGEM**

## **NOME COMERCIAL**

**BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA INTEGRADA ABERTA MASTER WIN ®.**



**Imbrasul**  
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

### **FORMA DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

A EMBALAGEM PRIMÁRIA (CAIXA DE PAPEL DE ALTA GRAMATURA) contém 20 bolsas de colostomia.

A CAIXA DE EMBARQUE (DE PAPELÃO ONDA DUPLA) CONTÉM 20 EMBALAGENS PRIMÁRIAS E MEDE 33x31x46cm.

### **INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE**

As bolsas de colostomia Master Win<sup>®</sup> destinam-se à coleta de excreta E EXSUDATOS de estomas.

### **PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO**

As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a placa adesiva fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege a pele do contato com os efluentes.

### **MODO DE USO**

A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele periestoma contra a irritação causada pelos efluentes:

- 1) Assegurar-se de que a pele periestoma esteja limpa, seca e livre de qualquer substância oleosa, sabão ou solvente que possa prejudicar a aderência. Limpar a área com água e sabão e secar completamente, o suporte adesivo flexível só adere à pele seca.
- 2) Não é necessário nem recomendado o uso de adesivos cirúrgicos adicionais para segurar a bolsa.
- 3) Não é necessário retirar a bolsa de colostomia durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina. Contudo, após o contato com a água o suporte adesivo e a parte de trás da bolsa devem ser secos com uma toalha.
- 4) Pequenas porções da barreira protetora podem permanecer na pele durante o processo de troca da bolsa. Não é necessário remover completamente todo o resíduo.

### **PREPARAÇÃO DA BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A APLICAÇÃO**

- 1) Medir o tamanho do estoma com o guia de medida que acompanha o produto.
- 2) Retirar o plástico protetor do disco.
- 3) **IMPORTANTE:** Antes de recortar o disco, separar as paredes da frente e de trás da bolsa, a fim de evitar cortar a parede frontal.
- 4) Recortar o orifício inicial ligeiramente maior que o diâmetro do estoma, usando o guia de medidas impresso no papel aderente.
- 5) Remover o papel aderente do disco protetor de pele.
- 6) Desprender o papel que protege o suporte adesivo, dobrando as pregas laterais para trás. **NÃO** remover completamente o papel das bordas laterais, por enquanto.

### **APLICAÇÃO DA BOLSA**

- 1) Segurar a bolsa pelos dois lados e posicionar o disco com a abertura sobre o estoma.
- 2) Pressionar o disco contra a pele, prestando particular atenção à área periestoma.
- 3) Pressionar o suporte adesivo contra a pele, assegurando-se de que ele fique liso e sem rugas.
- 4) Retirar o restante do papel que protege as bordas laterais e alisá-las sobre a pele. A bolsa pode permanecer aplicada enquanto estiver confortável e segura.



### **FIXAÇÃO DO CLIPE DE FECHAMENTO**

- 1) Segurar o clipe aberto, pela dobradiça, com a mão direita.
- 2) Dobrar a extremidade aberta da bolsa sobre a "lâmina" inferior do clipe, somente uma vez, manter no lugar.
- 3) Pressionar firmemente a lâmina erguida do clipe (principalmente no centro), até ouvir um estalo indicando que as lâminas se fecharam com segurança.

### **ABERTURA DO CLIPE DE FECHAMENTO**

Usando ambas as mãos, separar a "lâmina" superior do clipe, da parte inferior.

### **REMOÇÃO DA BOLSA**

Começando pela parte superior, pressionar levemente a pele adjacente com uma das mãos e remover cuidadosamente a barreira protetora da pele com a outra mão, até retirar completamente a bolsa.

### **COMPOSIÇÃO**

As bolsas de colostomia Master Win<sup>®</sup> são constituídas de uma peça aberta com barreira cutânea hidrocolóide.

Bolsa: membrana altamente resistente, revestida de película de EVA ou TPE;

Barreira da pele: hidrocolóide+tecido-não-tecido (adesivo microporoso removível);

Forro interno: polietileno ou tecido-não-tecido;

Clipe: plástico (PVC).

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

As bolsas de colostomia Master Win<sup>®</sup> devem ser armazenadas em local seco com temperatura AMBIENTE. Não devem ser armazenadas em ambientes com temperatura superior a 40°C, úmido ou geladeira.

### **OBSERVAÇÕES**

Não utilizar desinfetante, sabão ou detergente para limpar a pele ao redor do estoma. Não é necessário nem recomendado o uso de adesivos cirúrgicos adicionais para segurar a bolsa. Não é necessário retirar a bolsa de colostomia durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina.

Tricomicar a área localizada em torno do estoma, ou a bolsa de colostomia para que haja boa adesão à pele e para que a ocorrência de foliculite seja evitada. Limpar o estoma de dentro para fora somente com água morna.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL

VALIDADE: 5 ANOS

### **FABRICANTE**

YANCHENG DILING MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

### **IMPORTADOR**

IMBRASUL – IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LINDOLFO COLLOR, 31– CENTRO – PELOTAS-RS – CEP: 96020-470

ANVISA: 8062266