

FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL HAIBREATH

- Indicações para o uso.

O fixador de tubo endotraqueal Haibreath é indicado para pacientes com tubo endotraqueal, sob ventilação mecânica. Sua função é fixar e estabilizar o tubo endotraqueal diminuindo o risco de extubação acidental. Pode também ser utilizado para acomodar máscaras laríngeas.

- Características

Acomoda diversos tamanhos de tubo endotraqueal,
a partir de 5,5 até 10.

Acomoda todos os tamanhos de máscara laríngea.



- Modo de Uso

1. Assim que o tubo endotraqueal estiver propriamente posicionado, alimente a extremidade do tubo através da abertura do suporte e posicione no bloco de mordida, rosqueando a trava até estar bem fixo e seguro.
2. Avance o bloco de mordida até a boca do paciente e posicione em cima da língua.
Nota: O bloco de mordida deve ser posicionado centralmente.
3. Corra a fita atrás da cabeça.
4. Garanta a extremidade livre para o outro lado do suporte
5. Ajuste a fita para fornecer equilíbrio e segurança adequada.
6. Para remover o produto, solte a banda de fixação.
7. Desrosquear o suporte da trava para abrir, removendo o produto com atenção para não retirar o tubo endotraqueal.

- Precauções

1. Verifique o paciente com frequência para assegurar que o Fixador de Tubo Endotraqueal bem como o próprio tubo endotraqueal estão fixados e bem posicionados.
2. Inspeção os lábios e pele do paciente com frequência para minimizar o risco de ferimento por pressão.
3. Descontinue o uso do equipamento em caso de vermelhidão ou irritação da pele.
4. Produto Livre de Látex.

Registro na Anvisa: 81045420018