

Cadastro / Registro M.S.:

10369460202

Modelos Cadastrados:

Tamanhos: Fr 4, Fr 6, Fr 8, Fr 10, Fr 12, Fr 14, Fr 16, Fr 18, Fr 20, Fr 22, Fr 24, Fr 26, Fr 28, Fr 30, Fr 32, Fr 34, Fr 36.

Indicação de Uso:

A sonda gástrica Levine Solidor® está indicada para introduzir alimentos, nutrientes, medicação ou outros materiais no estômago de pacientes, drenar conteúdo indesejado ou descomprimir os gases e líquidos (drenagem gástrica), coleta de amostras e lavagem gástrica no estômago.

Instrução de Uso:

Se possível, informar o paciente sobre o procedimento que ele será submetido.

01. Verificar a integridade da embalagem unitária, o prazo de validade do produto e a integridade do produto.

02. Calçar luvas de látex descartáveis, estéreis.

03. O paciente deve estar em uma posição deitada ou semi-deitado. A cabeça deve ficar inclinada para trás, porém o pescoço deve estar direcionado para frente. Se aplicável, pode-se utilizar lubrificante a base de água.

04. Introduzir a sonda através de uma narina. À medida que a mesma penetra na nasofaringe, solicitar ao paciente que exteriorize a língua (sensação de reflexo de deglutição), se indicado, pode-se utilizar um anestésico a base de lidocaina nas narinas.

05. A sonda deve deslizar para dentro do esôfago sem oferecer nenhuma resistência. Se entrar equivocadamente na traqueia, o paciente engasga. Caso isso ocorra, puxar de volta e repetir o procedimento.

06. Atentar-se à marcação em cm do tubo, para garantir a posição da inserção. A resistência será sentida após o tubo entrar no estômago.

07. Quando a sonda está no esôfago, consegue-se movimentar a mesma facilmente. Com a sonda posicionada, iniciar a alimentação enteral. Quando a ponta estiver posicionada no estômago, a sonda é fixada ao nariz ou bochecha. A área preparada é coberta com uma tira de adesivo hipoalergênico: a seguir, a sonda é colocada sobre o adesivo e fixada com outro pedaço de adesivo.

08. Conectar a sonda de acordo com o procedimento a ser adotado junto ao paciente.

Importante: ao término de cada alimentação, fazer a lavagem da sonda com bastante água, evitando incrustações ou obstrução. Essa limpeza deve ser eficaz.

Ao final do procedimento, retirar a sonda de modo delicado e descartá-la de acordo com as autoridades sanitárias vigentes. A responsabilidade da limpeza da sonda é de responsabilidade do profissional que está assistindo o paciente.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

- Conservar em local limpo, fresco e seco, sem incidência direta de luz e longe de possíveis contaminações.
- Não utilizar caso a embalagem esteja danificada.
- O local de armazenamento e transporte deve ser limpo, seco, fresco, longe da luz direta do sol e protegido de claridade.
- Não pisar ou apoiar peso nas embalagens.

Advertência/Precaução:

- Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Ler as instruções antes de usar. O uso impróprio pode causar lesões sérias ou até fatais.
- É muito importante a seleção adequada do tamanho do tubo para cada paciente.
- Não forçar o tubo caso encontre qualquer obstrução durante a entubação.
- A aspiração é uma experiência dolorosa. Os pacientes devem ser informados com antecedência.
- Caso a sonda entre equivocadamente na traqueia, o paciente poderá engasgar e regurgitar a ponta proximal da sonda através da boca. Caso isso ocorra, a sonda deve ser retirada e o procedimento repetido. Quando a sonda está no esôfago, a mesma pode ser movida facilmente.
- Quando a sonda estiver posicionada, deve-se iniciar a alimentação/sucção.
- Observar o paciente durante aspiração/introdução de alimentação enteral. Qualquer sinal de alteração das condições vitais, interromper o procedimento imediatamente.
- Ao final do procedimento, retirar a sonda delicadamente.

- Não usar o produto fora do prazo de validade.
- Este é um dispositivo de uso único. Não reesterilizar e não reutilizar.
- Deve ser descartado como material biológico.

Validade:

5 anos.

Contraindicação:

Não se aplica

Importado e Distribuído:

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda

Rua Padre Damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40

SAC: 0800 6658007

Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo - CRF: 41067

Fabricante:

Bonree Medical Co. Ltd.

Nº 4 Longzhu Garden, Wanmu Industrial Estate, Nanlang 528451, Zhongshan, Guangdong, China

Versão I resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 165, 173, 187 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525