

INSTRUÇÕES DE USO

CURATEC Bota de Unna

Descrição

Curatec Bota de Unna consiste em uma bandagem impregnada com pasta à base de óxido de zinco.

Indicações

Curatec Bota de Unna é indicado para tratamento ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros inferiores.

Composição

Água purificada, Goma Acácia, Óleo de Rícino, Glicerina, Óxido de Zinco, Cera Autoemulsionante Não Iônica e Conservantes (mistura de fenoxietanol e parabenos).

Contraindicações

O produto é contraindicado para úlceras arteriais e úlceras mistas (comprometimento venoso e arterial).

Não utilizar em caso de alergia conhecida, ou de suspeita de alergia, a qualquer um dos componentes do produto.

Em caso de reação alérgica ou hipersensibilidade, suspender o uso imediato do produto e procurar orientação médica.

Precauções

Em algumas situações não é aconselhável a utilização de Curatec Bota de Unna, como nos casos de celulite (inchaço e eritema na área da ferida) e processo inflamatório intenso, pois a compressão aumentará a dor no local; também não é aconselhável o uso em pacientes com diabetes mellitus, pois há risco de diminuição da perfusão sanguínea no membro acometido.

Curatec Bota de Unna não pode ser cortado e aplicado à lesão. Deve ser usado segundo a indicação do fabricante, sob orientação de um profissional da saúde.

Modo de uso

A bandagem pode ser mantida intacta por até 7 dias, a menos que haja desconforto, vazamento de exsudato, sinais clínicos de infecção, dormência e latejamento dos dedos ou em caso de quaisquer outras irritações locais.

Fazer repouso com os membros inferiores elevados imediatamente antes da aplicação do curativo Curatec Bota de Unna, até a regressão do edema.

Realizar a limpeza da ferida de acordo com a prática rotineira, enxaguar bem e secar a pele adjacente antes da aplicação da bandagem. Em seguida, proceder ao enfaixamento conforme instruções a seguir.

Aplicação de Curatec Bota de Unna



1- Iniciar a aplicação da bandagem pela base do pé, mantendo o pé e o calcanhar em ângulo reto. A bota deverá envolver a perna sem apertar e sem deixar abertura ou enrugamento;



2- Aplicar a bandagem ao longo da perna até a altura do joelho;



3- Aplicar uma bandagem elástica ou faixa de crepe para fixação da Bota. Manter a pressão uniforme recobrimo completamente o Curatec Bota de Unna;

Para um melhor controle do exsudato, sugerimos:

4- Aplicar um curativo secundário, gaze estéril ou compressa cirúrgica no local da lesão para absorver a exsudação;

5- Colocar outra faixa de crepe para fixação do curativo absorvente;

6 - Trocar o curativo absorvente e sua faixa de fixação sempre que sujos ou molhados.

Remoção de Curatec Bota de Unna

Levantar a borda livre da bandagem desenrolando-a cuidadosamente ao longo da perna. Não é necessário cortar a bandagem para remoção.

Apresentações

- | | |
|--------------------|---------------------|
| - 7,6 cm x 5 m; | - 10,2 cm x 5 m; |
| - 7,5 cm x 6 m; | - 10,2 cm x 6 m; |
| - 7,6 cm x 7 m; | - 10,2 cm x 7 m; |
| - 7,6 cm x 9,14 m; | - 10,2 cm x 9,14 m. |

Validade

Prazo de validade de 2 anos, mantendo o produto armazenado à temperatura ambiente e com embalagem intacta. Não pode estar aberta, rasgada, perfurada ou molhada.

Número de lote e data de validade: vide embalagem

Atendimento ao consumidor SAC: (12) 3202-1300 - sac@br.urgo.com

Fabricado por:

LM Farma Indústria e Comércio Ltda

R. Jaguarão, 95 - Chácara Reunidas - São José dos Campos - SP

Indústria Brasileira

Resp. Técnica: Ana Elisa de Almeida Souza - CRF-SP: 42.184

Registro na ANVISA/MS nº: 80246910003

www.curatec.com.br

Responsável Legal
Fabio de Souza Ferreira

Responsável Técnica
Ana Elisa de Almeida Souza
CRF/SP: 42.184