



Produto:	Bota de Unna Derma cure Plus
Registro:	80002190022
Razão Social:	E de Godoy Bragança Pta
Endereço do fabricante:	Avenida dos imigrantes, 6777 – Bairro Uberaba – Bragança Pta – SP- CEP 12926210
Modelo do produto médico	7,5cm x 6m ; 7,5cm x 9,2m ; 10,2cm x 9,2m
Apresentação do produto	Embalagem com 01 unidade
Validade	24 meses
Produto médico é de uso único	
Armazenamento	Local limpo e seco.
Instrução de uso	<p>MODO DE USO E INTERVALO DE TROCAS</p> <p>A bandagem pode ser mantida intacta por até sete dias, a menos que haja desconforto, vazamento de exsudato, sinais clínicos de infecção, dormência e latejamento dos dedos ou em caso de quaisquer outras irritações locais.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fazer repouso com os membros inferiores elevados imediatamente antes da aplicação da Bota de Unna, até a regressão do edema.• Realizar a limpeza da ferida de acordo com a prática rotineira, enxaguar bem e secar a pele adjacente antes da aplicação da bandagem. Em seguida, proceder ao enfaixamento conforme instruções a seguir:• APLICAÇÕES Para um melhor controle do exsudato, sugerimos: a) Iniciar a aplicação da bandagem pela base do pé, mantendo o pé e o calcanhar em ângulo reto. A bota deverá envolver a perna sem apertar e sem deixar abertura ou enrugamento; b) Aplicar a bandagem ao longo da perna até a altura do joelho; c) Aplicar uma bandagem elástica ou faixa de crepe para fixação da Bota. Manter a pressão uniforme recobrimdo completamente a Bota de Unna; d) Aplicar um curativo secundário, gaze estéril ou compressa cirúrgica no local da lesão para absorver a exsudação; e) Colocar outra faixa de crepe para fixação do curativo absorvente; f) Trocar o curativo absorvente e sua faixa de fixação sempre que sujos ou molhados.
Advertências	O produto é válido por 24 anos, a partir da data de fabricação, uma vez que a embalagem não sofreu nenhum dano e o produto permaneceu em local limpo e seco e arejado. Não utilizar caso a



E DE GODOY BRAGANÇA TEXTIL EPP

embalagem esteja violada.