

***INJEX*** **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**  
AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP.  
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 19908-170  
C.X.postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302-2900 e-mail: [injex@injex.com.br](mailto:injex@injex.com.br)  
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> SAC: 0800 7 70 60 80

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **TORNEIRA DE TRÊS VIAS INJEX**

#### **FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:**

#### **INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscriç. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: [www.injex.com.br](http://www.injex.com.br)

Cadastro ANVISA nº: 10160610058

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto – CREA-SP 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

#### **INSTRUÇÕES DE USO**

- Retire a torneira de sua embalagem em condições assépticas;
- Conecte o conector luer macho ao cateter que está aplicado à artéria do paciente;
- O conector luer fêmea fica livre para que o profissional conecte seringas ou equipamentos para realizarem a perfusão que considerem necessárias;
- Para que possa ocorrer a perfusão, é só virar a chave para liberar a passagem ou as passagens para os medicamentos. Um único “CLIQUE” indica que está seguramente no lugar;
- Descarte o produto após o uso em locais apropriados;
- Nunca reutilize o produto. Nunca reesterilize.