



Ficha Técnica Compressa de Gaze Estéril BMedical

1-Informação da Empresa:

Razão Social: Bela Comercio Importação e Exportação, Fabricação de produtos e Equipamentos Ltda

Cnpj: 37.351.602/0001-01

Endereço: Avenida Montreal 445 , Bairro Jardim Canada , Nova Lima , Minas Gerais
CEP 34007-720

AFE: 822729-3

Responsavel Técnico: Thayná Marcele Martins Guedes CRF/MG 34.980

2-Descrição do produto:

- Nome Técnico: Compressa
- Nome Comercial: Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Bmedical
- Registro Anvisa: 82272939001
- Tecido 100% algodão plano, de baixa densidade de fios por centímetro, ligamento tafetá (tela), alvejado (isento de amido, corantes corretivos e alvejante óptico), inodoro e insípido com cinco dobras e oito camadas. Apresenta-se estéril e sem fio radiopaco firmemente fixado ao seu corpo;
- Sem elemento radiopaco;
- Embaladas em envelopes de filme e PGC (papel grau cirúrgico);
- Abertura asséptica em Pétala;
- Esterelizado por Óxido de Etileno;
- Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira.
- Produto de uso único;
- Validade 5 anos.

3-Apresentação do Produto:

- Produzidos com 5 dobras e 8 camadas;
- Densidade: 9 , 11, 13 fios /cm²;
- Envelopes com 5 , 10 , 20 unidades
- Dimensional fechada: 7,5 cm x 7,5 cm ou 10 cm x 10 cm;
- Dimensional aberta: 13 cm x 24 cm; 15 cm x 24 cm; 15 cm x 25 cm; 15 cm x 26 cm; 15 cm x 30 cm; 20 cm x 40 cm; 18 cm x 38 cm; 91cm x 50 cm; 91 cm x 60 cm; 91 cm x 1 m; 91 cm x 2 m ou 90 cm x 1,30m;
- Sem fio radiopaco.

CÓDIGO	TAMANHO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	CÓDIGO DE BARRAS
17	9 FIOS 7,5cm x 7,5cm	PCT C/10	500 PCT	7893596029370
18	11 FIOS 7,5cm x 7,5cm		500 PCT	7893596029318
19	13 FIOS 7,5cm x 7,5cm		500 PCT	7893596029417



4-Indicação de uso / Finalidade:

A compressa de Gaze Estéril Bmedical é indicada para cirurgias na absorção de sangue e secreções, barreira (hemostática) antiaderente na contenção de hemorragias, intervenções cirúrgicas e para curativos.

5-Instrução de Uso:

Abrir a embalagem através da técnica asséptica, pela pétala de abertura, para diminuir o risco de contaminação.

Retirar as compressas de gaze da sua embalagem e aplicar sobre a área lesionada que necessite que o sangue e/ou as secreções sejam absorvidos, ou sobre a área da ferida aberta, ou em curativos de forma geral.

6-Precauções, Restrições e Advertências:

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.
- Produto de uso único. Proibido reprocessar. Destruir após o uso.
- Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- Após o uso descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.
- Não é recomendado realizar a abertura da Compressa de Gaze para sua utilização.

7-Armazenamento e Transporte:

Armazenar e transportar em local limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e luz solar. Não há faixas de temperatura e umidade determinadas para o armazenamento e transporte do produto. Sendo assim, o produto pode ser armazenado e transportado sem a necessidade de controle de temperatura e umidade, seguindo as recomendações citadas.

8-Contraindicações:

Não se aplica.

9-Foto do produto:



Compressa de
Gaze
HIDROFILA ESTÉRIL

+ **10 unidades**

 **8 Camadas**
5 dobras

 **Alta Absorção e**
Proteção nos Curativos

 **Feito em 100% Algodão**



Ideais na absorção de secreções,
contenção de hemorragias e proteção de
curativos.

Isentas de impurezas e substâncias que
podem contribuir para a contaminação
e infecção hospitalar. Esterilizado
por Óxido de etileno.

Composição: 100% algodão.

Conservar em ambiente seco e limpo.

Validade 5 anos.

Fabricado por:
Bela Indústria Comércio Importação e
Exportação de Produtos e Equipamentos Ltda.
Av. Montreal, 455 - Jardim Canadá
Nova Lima - Minas Gerais - CEP 34007-720
CNPJ Matriz: 37.351.602/0001-01
CNPJ Filial: 37.351.602/0002-84
ANVISA N. 82272939001


Resp. Técnico: Thayná Marcele Martins Guedes
CRF: 34.980 - AFE Anvisa - 8.22729-3

belaindustria.com.br

7,5x7,5cm (fechado)

 Destruir após o uso

 Uso único

 Proibido reprocessar



sac@belaindustria.com.br

Sac: (31) 3665-9091



Indústria Brasileira



(31) 3311-4800

Endereço: Avenida Montreal, 445

Nova Lima, Jardim Canada - MG

CEP - 34007-720