	<b>Especificação de Produto</b> <b>12-032</b>	Revisão N°.:03 Data da Emissão: 28/02/2022 Data da Revisão:19/07/2023 Resp.: P&D
---	--	---

## Especificação Técnica de Produto

**Produto:** Hidrocoloide Plus com Espuma M-tec

**Descrição:** produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placas, estéril por radiação gama.

**Registro Anvisa N°:** 80003300028


**Composição:** Composto por uma camada de carboximetilcelulose (CMC), dióxido de silício coloidal, uma camada adesiva de borracha sintética a base de Estireno-Isopreno (SIS), poliisopreno, vaselina, antioxidante, poliisobutileno e resina hidrocarbônica, uma camada absorvente de espuma de polietileno, protegido por um papel siliconizado. Isento de látex e gelatina.

**Indicação:** Indicado para o cuidado de feridas úmidas ou baixa exsudação, úlceras dérmicas de espessura parcial ou total, úlceras de pressão, de edema e diabéticas, queimaduras (primeiro e segundo grau), áreas doadoras de pele e enxertos. Indicada para o auxílio na prevenção de lesões por pressão e por pressão a dispositivos ou áreas expostas ao atrito como cotovelos, calcanhares ou área sacral, curativos de estomia para proteger a pele do efluente estomacal.

**Precauções:** Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e / ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

**Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

**Advertências:** não é indicado para controlar sangramentos intensos. Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida a algum componente do curativo. Não use como implante cirúrgico.

	<b>Especificação de Produto</b> <b>12-032</b>	Revisão N°.:03 Data da Emissão: 28/02/2022 Data da Revisão:19/07/2023 Resp.: P&D
---	--	---

Não utilize este curativo sozinho para combater feridas infectadas, ele não possui ação antimicrobiana. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

**Modo de uso:** vide folheto de instruções de uso em Anexo.

**Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação.

**Apresentações:** Hidrocoloide na apresentação regular (standard) em cartucho com 10 unidades, embalados individualmente, no tamanho de 10cm x 10cm.

**Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:


Cód. Venda	Produto	Dimensões	Curativos / Cartucho	Cartuchos / CX Papelão	Cód. Barras EAN 13 Envelope Individual	Cód. Barras EAN 13 Cartucho
PA.0890	Curativo Hidrocoloide Plus com espuma	10 cm x 10 cm	<b>1</b>	<b>240</b>	7896544901728	7896544901735
<b>PA.1397</b>	<b>Curativo</b> <b>Hidrocoloide</b> <b>Plus com</b> <b>espuma</b>	<b>10 cm x</b> <b>10 cm</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>7896544901728</b>	<b>7896544901735</b>



**FOLHETO DE INSTRUÇÃO DE USO:**

Marca: M-TEC – Missner Tecnologia de Curativos

**CURATIVO HIDROCOLOIDE PLUS COM ESPUMA MISSNER**

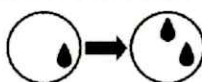

Indicado para feridas de leve a moderada exsudação

O Curativo Hidrocolóide Plus com Espuma M-TEC é composto basicamente por uma camada de hidrocolóide a base de carboximetilcelulose, uma camada absorvente de espuma de polietileno.

**Composição:** composto por uma camada de carboximetilcelulose (CMC), dióxido de silício coloidal, uma camada adesiva de borracha sintética de Estireno-Isopreno (SIS), polissopreno, vaselina, antioxidante, polissobutileno e resina hidrocarbônica, uma camada absorvente de espuma de polietileno, protegido por um papel siliconizado. Isento de látex e gelatina.

**Indicação:** os curativos Hidrocolóides Plus com Espuma M-TEC são indicados para: úlceras dérmicas de espessura parcial e total; úlceras de pressão, de edema e diabéticas; queimaduras (primeiro e segundo graus); áreas doadores de pele e enxertos de pele; feridas superficiais/escorações leves; proteção de pele frágil ou áreas expostas à fricção/atriço, como cotovelos, calcanhares ou área sacral; curativos de ostomia para proteger a pele do efluente estomacal; curativos pós-operatórios para proteção da linha de sutura e assaduras de bebês.

**Precauções:**

- A esterilidade do curativo é assegurada enquanto a embalagem estiver íntegra.

- O tratamento de qualquer úlcera cutânea deve fazer parte de um plano bem definido para o manejo da úlcera e sob a supervisão de um profissional de saúde especializado.

- Ao usar os curativos hidrocolóides, inicialmente a ferida parecerá maior e mais profunda à medida que tecido desnecessário é removido. Esse aumento deve ser acompanhado pela limpeza do tecido desnecessário. Este aumento e limpeza do tecido desnecessário deve apresentar uma melhor aparência da ferida. Se a ferida continuar aumentando após as primeiras trocas de curativos, consulte um profissional de saúde.

- Observe a ferida em busca de sinais de infecção. Se ocorrer infecção, cujos sinais podem ser febre, aumento da dor, vermelhidão, sangramento, inchaço ou um odor incomum de secreção, consulte um profissional de saúde. Curativos hidrocolóides podem ser usados em feridas infectadas somente sob os cuidados de um profissional de saúde.

- Raramente, pode ocorrer irritação (vermelhidão, inflamação), maceração (clareamento da pele) ou hipergranulação (formação excessiva de tecido) em algumas feridas com a utilização de curativos hidrocolóide. Se isso ocorrer, consulte um profissional de saúde.

- Se a ferida não começar a mostrar melhoras de cicatrização ou se ocorrer qualquer outro sintoma inesperado, consulte o profissional de saúde.

- A reutilização pode representar risco de infecção.

**Advertências:** Produto de uso único. Destruir após o uso. Os curativos Hidrocolóides Plus com Espuma M-TEC não são indicados para uso em indivíduos com uma sensibilidade conhecida aos hidrocolóides. Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e / ou o desempenho do curativo. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

**Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura entre 0° e 40°C.

**Instruções de Uso:**

1. Irrigar o local da ferida de acordo com o protocolo padrão, se necessário, e secar a pele circundante antes de aplicar o curativo.
2. Selecione um tamanho do Curativo Hidrocolóide Plus com Espuma que se estende além do local da ferida em pelo menos 2cm.
3. Retire o papel de proteção do curativo.
4. Aplique o curativo sobre a ferida, com uma leve pressão sobre a pele adjacente intacta, isso ajudará a garantir a adesão do curativo à pele do paciente.

**Troca e Remoção do Curativo:**

1. O Curativo Hidrocolóide Plus com Espuma pode permanecer no local da ferida por até 5 dias, dependendo da condição do paciente e do nível de exsudado. Se houver desprendimento voluntário do curativo ou necessidade de uma boa prática de cuidado antes dos 5 dias, o curativo deve ser removido totalmente e trocado.

2. Para remover o curativo, pressione a pele com uma mão e levante cuidadosamente a borda do penso com a outra mão. Se o curativo não for facilmente removido, umedeca com solução salina estéril antes da remoção. Descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais.

3. Se necessário, limpe o local da ferida antes da aplicação de um novo curativo.

**Validade: 5 anos**

**Fabricado por:** Pharmaplast SAE.

Annia Free Zone 23512, Alexandria, Egypt.

**Distribuído por:** Missner & Missner Ltda.

Rod. BR-470, 2870 - Km 54,6. Blumenau - SC.

Indústria Brasileira. CNPJ 03.225.411/0001-73.

Resp. Técnico: Dionei Neves / CRQ/13 - SC - 13.302.213.

Produto Estéril por Irradiação Gama.

**USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.**

Registro na Anvisa nº: 80003300028



Missner & Você  
www.missner.com.br  
0800 047 0015  
missner@missner.com.br

**Missner**  
Um toque de cuidado

**Lista e significado dos símbolos utilizados nas embalagens**

	Temperatura de armazenamento (0-40°C)		Não reutilizar		Esterilizado por radiação gama		Validade		LOT		REF		Armazene em local seco
	Não reutilizar		Não utilizar em medicamentos estéris		Validade		LOT		REF		Armazene em local seco		Validade
	Esterilizado por radiação gama		Não utilizar em medicamentos estéris		Validade		LOT		REF		Armazene em local seco		Validade
	Esterilizado por radiação gama		Não utilizar em medicamentos estéris		Validade		LOT		REF		Armazene em local seco		Validade

Elaboração:

Data: 19/07/23

Aprovação:

Data: 19/07/23

Bruno de Souza

Dionei Neves