

MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO

ULTRA GEL ELETRO

Gel para Eletrocardiograma

DESCRIÇÃO

O produto consiste em um gel, a base de água, indicado para uso como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos em eletrocardiografia, desfibriladores e similares..

Produto facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele. Sua fórmula exclusiva proporciona maior rendimento e excelente condutividade elétrica

CARACTERÍSTICAS

Consistência adequada
Componentes de alta pureza
Hidrossolúvel.
Facilmente removível.
Hipoalergênico.
Alto rendimento

COMPOSIÇÃO:

Água destilada
Carbômero
Metilparabeno
Glicerol
Trietanolamina
EDTA Dissodico
Corante
Fragrância

INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:

Indicado para uso como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo em monitores cirúrgicos, eletrocardiograma, desfibriladores.

MODO DE USAR:

- Aplicar uma fina camada do produto sobre a pele do paciente na área a ser tratada
- realizar o procedimento, posicionando o aparelho na área com gel.
- após o procedimento, remover o gel com toalha de papel ou tecido.
- após o uso, tampar a embalagem e guardar em local apropriado, seco e ao abrigo da luz.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS

O produto é de uso exclusivamente externo, é atóxico e hipoalergênico, não oferecendo em geral nenhum risco ao usuário. Na hipótese de alguma reação adversa, como irritação causada pelo gel, suspender o uso e procurar orientação médica.

APRESENTAÇÃO

O produto será comercializado em frasco plástico (polietileno) contendo 100, 250 ou 300 gramas, garrafa plástica (polietileno) contendo 1, 2 ou 5 kg, acondicionadas em caixa de papelão.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Deve ser armazenado em local seco, ao abrigo da luz, em temperatura ambiente.

DESCRIÇÃO PARA A EFICÁCIA E SEGURANÇA DO PRODUTO

O produto apresenta-se eficaz e seguro para a finalidade a que se destina, desde que sejam seguidos as orientações, suas advertências e seu modo de uso.

Resp. Técnico: Nivia Freitas do Nascimento

CRF/MG 26042

Fabricado por:

MULTIGEL IND. COM. DE PROD. GELATINOSOS LTDA

Rua Francisco Andrade, 111, Faixa Verde.

CEP. 37560-000 – Silvianópolis - MG

CNPJ 49.604.226/0001-90.

Ind. Brasileira.

Notificação ANVISA N °:

Responsável Técnico
Nivia Freitas do Nascimento
CRF/MG 26042

Representante Legal
Valmir Castillo Sanches