



## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### PRODUTO

CICLO GERM AMÔNIA QUATERNÁRIA DE 5ª GERAÇÃO E BIGUANIDA

**DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E  
ARTIGOS NÃO CRÍTICOS**

**NÍVEL INTERMEDIÁRIO**

### PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

#### ASSISTÊNCIA À SAÚDE

**COMPOSIÇÃO:** CLORETO DE N-ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, CLORETO DE DIDECIL DIETIL AMÔNIO, BIGUANIDA, CONSERVANTE, TENSOATIVO E VEÍCULO.

Item	Especificação	Parametro de Conformidade
1	Aspecto	Líquido Limpido
2	Sabor	NA
3	Cor	Incolor
4	Odor	Característico
5	pH	5,5 a 6,5
6	Densidade	0,98 a 1,1 g/mL

### GALÃO 5 L

**REGISTRO NA ANVISA/MS: N°  
3.3252.0010.002-6**

### OUTRAS APRESENTAÇÕES

**FRASCO SPRAY/ESPUMA 750 ML  
E FRASCO 1 L**

### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

#### INDICAÇÃO

COMBINAÇÃO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB), UM POTENTE AGENTE ANTIMICROBIANO DE ÚLTIMA GERAÇÃO E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO COM EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomona aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Candida albicans*, *Mycobacterium smegmatis* e *Mycobacterium bovis*. LIMPA E DESINFETA, O QUE IMPEDE A FORMAÇÃO DE BIOFILMES NAS SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS. CONFERE LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS E ESPOROS. COMPATIBILIDADE COM TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS. NÃO CORROSIVO FÓRMULA SEM CORANTE E SEM ÁLCOOL. NÃO IRRITANTE PARA OLHOS, MUCOSAS E PELE. RECOMENDADO PARA ARTIGOS; INCUBADORAS, BOMBAS DE INFUSÃO, TRANSDUTORES, RESPIRADORES E OUTROS

#### MODO DE USO

**LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E ARTIGOS:** A ESPUMA DEVE SER APLICADA PURA DIRETAMENTE NO LOCAL COM AUXÍLIO DE PANO LIMPO, DEIXAR EM CONTATO POR 10 MINUTOS, RETIRE O EXCESSO DO PRODUTO COM PAPEL DESCATÁVEL. NÃO É NECESSÁRIO ENXAGUAR.

**DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS:** COLOCAR OS ARTIGOS IMERSOS NO PRODUTO PURO E DEIXAR EM CONTATO POR 10 MINUTOS. RETIRAR OS ARTIGOS, ENXAGUAR COM ÁGUA E SECAR.

**DESINFECÇÃO DE ARTIGOS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA:** COLOCAR OS ARTIGOS IMERSOS NO PRODUTO PURO E DEIXAR EM CONTATO POR 30 MINUTOS. RETIRAR OS ARTIGOS, ENXAGUAR COM ÁGUA E SECAR.

**VALIDADE:** 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que mantidas as condições de estocagem na embalagem original.