



CICLO GERM

DESINFETANTE DE
NÍVEL INTERMEDIÁRIO

QUARTENÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO E BIGUANIDA PRODUTO 2 EM 1 LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PRONTO USO.

**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. PRODUTO
EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE.**

INDICAÇÃO: CICLO GERM é um desinfetante de nível intermediário PRONTO USO contendo Amônia Quaternária de 5ª geração e Biguanida, usado para limpeza e desinfecção, de superfícies fixas e artigos não críticos e materiais de inaloterapia e assistência respiratória em estabelecimentos de assistência à saúde. Indicado para limpeza e de desinfecção de pisos, mobiliários, mesas, bancadas, incubadoras, bombas de infusão, transdutores respiratórios, pode ser usado em revestimentos em vinil, emborrachados, porcelanatos, vidros, ou acrílicos, látex, aço inox, alumínio, cobre, ferro, latão, plásticos e polietileno. Possui ação comprovada contra: *Staphylococcus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*, com tempo de contato de 10 minutos e para *Escherichia coli*, *Candida albicans*, *Trycophyton mentagrophytes*, *Mycobacterium smegmatis* e *Mycobacterium bovis* com tempo de contato de 30 minutos. NÃO IRRITANTE PARA PELE, MUCOSAS E OLHOS. NÃO CORROSIVO.

MODO DE USO: Limpeza e desinfecção de superfícies fixas: Aplicar o produto puro ou com auxílio de um pano limpo ou MOP sob a superfície a ser tratada. Deixar em contato por 10 minutos. Não é necessário o enxágue. Não aplicar diretamente na superfície dos eletrônicos.

Desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Colocar os artigos imersos no produto PURO deixando em contato por 10 minutos. Retirar os artigos, enxaguar e secar. Utiliza-los o mais breve possível.

Desinfecção de materiais de inaloterapia e assistência respiratória: Lavar, enxaguar e secar os artigos, imergir no produto puro deixando em contato por 30 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utiliza-los o mais breve possível.

COMPOSIÇÃO: Cloreto de Didecyl Dimethyl Ammonium, n-Alquil Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Cloridrato de Polyhexametileno Biguanida, conservante, tensoativo não iônico e veículo.

PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de Didecyl Dimethyl Ammonium, n-Alquil Dime thyl Benzyl Ammonium Chloride 0,6% (p/v) e Cloridrato de Polyhexametile no Biguanida 0,26% (p/v).

DESCARTE DO PRODUTO: Caso o produto não seja usado, o mesmo poderá ser incinerado ou descartado de acordo com as normas específicas da região.

ADVERTÊNCIAS

Utilize material de proteção para seu manuseio. Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

PRECAUÇÕES: Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não beber, comer ou fumar durante a aplicação.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Manter o produto na temperatura ambiente (15 a 30°C) em local ventilado e ao abrigo da luz solar, armazenar em sua embalagem original.

FABRICADO E ENVASADO POR:

Indústria Brasileira
Ciclo-Farma Indústria Química Eireli
Rua Benedito José de Carvalho Ramos, 150
Parque Industrial - Serrana/SP
CEP 14150-000
CNPJ: 05.854.999/0001-50

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

MS Nº3.03252-5

REGISTRO ANVISA:

Nº 3.3252.0010.002-6

NÚMERO DO PROCESSO:

25351.512833/2015-30

SAC 0800 709 9287
CEATOX: 0800 014 81 10



CICLO FARMA

QUÍMICA PARA A VIDA

CONTEÚDO 5 L

ATENÇÃO

MANTER FORA DO
ALCANCE DE CRIANÇAS
E ANIMAIS DOMÉSTICOS



Lote e data de fabricação
vide marcação na embalagem

