



Agulha Gengival Estéril de Uso Único

Informações Gerais

A lanceta tri-chanfrada ultra afiada oferece uma entrada suave no tecido, aumentando o conforto do paciente, enquanto o revestimento de silicone reduz significativamente a dor e os danos nos tecidos. Indicador de bisel triangular para orientação da ponta da agulha. Esterilizado por OE.

Especificação:

27G/Short	0,4 x 21mm	Azul
27G/Long	0,4 x 30mm	Azul Marinho
27G/Long	0,4 x 35mm	Marrom
27G/Long	0,4 x 38mm	Roxo
30G/X-short	0,3 x 12mm	Amarelo
30G/Short	0,3 x 21mm	Laranja
30G/Short	0,3 x 16mm	Rosa
30G/Long	0,3 x 25mm	Vermelho
31G/X-short	0,26 x 12mm	Verde

Instrução para Uso

- Não dobre mais de uma vez o corpo metálico no ponto de junção com a parte plástica. A agulha pode quebrar no tecido e causar ferimentos
- Quebre o selo hermético (Torça a tampa para abrir - Não dobre nem abra)
- Primeiro insira a seringa no cartucho com anestésico e só então coloque a agulha
- A agulha deve permanecer dentro da tampa protetora até o momento do uso real
- Use a tampa protetora para remover a ponta


- Gire a tampa para abrir



- Conecte a agulha na seringa



- Remova a tampa

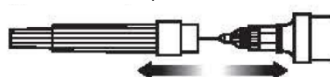

Cuidados

- Não use se o selo estiver quebrado. Não dobre a agulha antes de usar
- Use imediatamente após abrir o selo da unidade e mantenha a agulha coberta até a hora de usar
- Não armazene em temperatura e umidade extremas, e evite a luz solar direta.

Legenda

Conformidade com	CE Communauté Européenne
Limitação de temperatura	
Esterilização de Irradiação	STERILIZED
Não reutilize	
Mantenha longe da luz solar	
Código de lote	LOT



Fabricante

SPIDENT CO., LTD.

203 & 312, Korea Industrial Complex, 722,
Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon, Coreia, 405-821
TEL +82-32-821-0071 FAX. +82-32-821-0074

www.spident.co.kr



Representante da UE

AR Experts B.V. (nome comercial: CE Medical)

Amerlandseweg 7, 3621 ZC, Breukelen, Países Baixos
TEL. +31 (0)85 007 32 20



Armazenamento e Uso

Este produto é esterilizado com óxido de etileno. Não reesterilize e não use se a embalagem estiver danificada. A vida útil à temperatura ambiente é de 48 meses. Consulte a embalagem externa para obter a data de validade.

Descarte

Deve ser manuseado de acordo com as leis e regulamentos locais.

Informação ao Cliente

Nenhuma pessoa está autorizada a fornecer qualquer informação que se desvie das informações fornecidas nesta folha de instruções.

Cuidado

Produto de uso por profissional habilitado.

Garantia

A Spident® garante que este produto estará livre de defeitos de material e fabricação.

A Spident® NÃO OFERECE OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM.

O usuário é responsável por determinar a adequação do produto para a aplicação do usuário. Se este produto apresentar defeito dentro do período de garantia, seu recurso exclusivo e a única obrigação do Spident® será o reparo ou substituição do produto do Spident®.

Limitação de Responsabilidade

Exceto onde proibido por lei, a Spident® não será responsável por quaisquer perdas ou danos decorrentes deste produto, sejam diretos, indiretos, especiais, incidentais ou consequentes, independentemente da teoria afirmada, incluindo garantia, contrato, negligência ou responsabilidade objetiva.

Proibido Reprocessar.

Detentor da Notificação

Mandala Brasil Importação de Produto Médico Hospitalar LTDA
Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 5570 Salas 502, 1201 e 1202, Zona 07 - Maringá/PR

CEP: 87020-035 - Fone: 44 3023 1710

Site: www.mandala-intl.com

Notificação ANVISA: 80686369079

Fabricante	
Usar até	
Manter seco	
Atenção, consulte os documentos anexos	
REPRESENTANTE AUTORIZADO NA COMUNIDADE EUROPEIA	EC REP