



*Winner Indústria de Descartáveis Ltda.*  
*Ficha Técnica*

**CAMPO DE MESA AUXILIAR IMPERMEÁVEL LAMINADO ESTÉRIL WINNER**

REGISTRO ANVISA: 80201960051

CÓDIGO DO PRODUTO: 9 – Tamanho 1,30x 180

**COMPOSIÇÃO:**

O Campo de Mesa Auxiliar Impermeável Laminado Estéril Winner é fabricado em não tecido (SMS) de polipropileno laminado em polietileno, unidos por calandragem térmica, em gramatura 50g/m<sup>2</sup>, com baixo índice de desprendimento de partículas.

**VALIDADE:**

5 anos a partir da data de fabricação.

**INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO:**

O Campo de Mesa Auxiliar Impermeável Laminado Estéril Winner é destinado para a cobertura da mesa auxiliar, cooperando para o manuseio dos instrumentais cirúrgicos durante os mais variados procedimentos. Oferece máxima qualidade, praticidade e segurança nos trabalhos hospitalares. Confere barreira de proteção impermeável, oferecendo proteção contra a contaminação de áreas estéreis pela disseminação de partículas portadoras de microrganismos.

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:**

- Produto de uso externo;
- Produto de uso único;
- Proibido reprocesso;
- Produto impermeável;
- Observar atentamente as instruções de uso;
- O produto é apirogênico, isento de látex não oferecendo em geral risco ao usuário;
- O produto deve ser manuseado por profissionais da área da saúde, devidamente habilitados e familiarizados para a execução dos procedimentos que envolvam o uso desse tipo de produto;
- O produto apresenta dobraduras totalmente assépticas;
- Conservar em local fresco e seco, ao abrigo de luz e umidade;
- Não utilizar o produto caso sua embalagem original apresente sinais de violação ou data de validade e/ou esterilidade expiradas;
- Produto esterilizado por óxido de etileno. Esterilidade assegurada enquanto a embalagem não for violada;
- Mantenha o produto distante de objetos cortantes e/ou pontiagudos;

- Abrir a embalagem somente no momento do uso e de forma asséptica;
- Descartar após o uso em local apropriado.

**EFEITOS ADVERSOS:**

Não são relatados efeitos adversos ao uso deste produto.

**FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:**

O produto apresenta-se com embalagem primária contendo 1 unidade do produto embalado em papel grau cirúrgico, com marcador de esterilidade e embalagem secundária composta de 10 ou 100 unidades acondicionadas em caixas de papelão devidamente identificada. Apresenta-se em tamanhos variados de acordo com a necessidade de produção.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

1. Avaliar a integridade da embalagem;
2. Observar a data de validade;
3. Abrir a embalagem pelo local indicado, evitando contaminação do produto;
4. Abrir a embalagem e retirar o Campo de Mesa Auxiliar de forma asséptica, segurando-o pelas extremidades e dispor sobre a mesa cuidadosamente;
5. O produto está pronto para ser utilizado no local de aplicação;
6. Após o uso descartar em local apropriado.

**FABRICANTE:**

WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA

CNPJ: 05.421.585/0001-37

Rua Macaúba, LOTE 01 – Águas Claras

Brasília – DF CEP: 71928-180

TEL: (61) 3435-6750 / 3435-6754