



Cânula de Guedel Seven Care

Anvisa: 81908729004

INSTRUÇÃO DE USO:

1. Para selecionar o tamanho apropriado, posicione a cânula lateralmente ao rosto do paciente desde o ângulo da mandíbula (abaixo do lóbulo da orelha) até a comissura labial. O tamanho ideal não deve ultrapassar esta medida.
2. Abrir a embalagem e retirar a cânula utilizando técnicas assépticas.
3. Posicionar o paciente em decúbito dorsal e elevar seu queixo afim de abrir as vias aéreas.
4. Inserir a Cânula de Guedel Seven Care com seu lado côncavo para o palato duro e fazer uma rotação de 180°, seguindo a anatomia da cavidade orofaríngea. Caso seja necessário, um abaixador de língua pode ser utilizado durante o procedimento; Nota: Em crianças a cânula deve ser inserida diretamente sobre a língua para prevenir traumatismos secundários em seus dentes e palato.
5. Para retirar, puxe suavemente a cânula e a descarte em local apropriado.