

KIT PARA NEBULIZAÇÃO VITALGOLD

REGISTRO ANVISA 10296900071

INSTRUÇÕES DE USO

1. Girar a tampa do reservatório e retirar a tampa superior.
2. Adicionar o medicamento líquido de acordo com a prescrição medica.
3. Colocar a tampa e girar para fecha-la. Conectar a máscara ao reservatório.
4. Colocar a máscara no rosto do paciente com a elástico abaixo das orelhas, e ao redor do pescoço. Puxar suavemente as extremidades do elástico, até que a máscara esteja segura. Formar a tira de metal na máscara para ajustar o nariz.
5. Conectar o extensor ao fornecimento de oxigênio ou ar comprimido.
6. Fazer a inalação da névoa conforme orientação médica.
7. Finalizada a emissão de névoa, desconectar a extensão.
8. Limpar todos os acessórios.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Produto não esterilizado

Importante: Certificar-se cuidadosamente para que o Kit Nebulizador e todos os seus acessórios estejam limpos, antes de utilizar/reutilizar o Kit Nebulizador.

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

Leia as instruções antes de usar.



ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joaomed.com.br

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

