

RELATÓRIO TÉCNICO

BIOART AF
Equipo para irrigação
MS.: 80330630015

MARCA



FABRICANTE

BIOTEC PROD HOSP LTDA
Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão C –
Terra Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000
CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE:
433.097.131.111
MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000
E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br

Composição:

Equipo estéril com tubo em PVC cristal, isento de látex, atóxico, ponta introdutora/ perfurador com tampa, pinça corta – fluxo em todas as extensões, acoplamento tipo Y, câmara perfuradora, conector perfurador duplo. Conectores do equipo em duas configurações: GRADUADO ou LUER LOCK.

Indicação:

É indicado para irrigação de médio e alto fluxo, em procedimentos de urologia, ginecologia, artroscopia, citoscopia e procedimentos médicos.

Apresentação:

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 1 unidade.
Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 12 caixas.

Instrução de Uso:

Abrir assepticamente a embalagem no momento do uso.
Verificar se o CONECTOR é adequado ao instrumental médico.
Conectar a extensão com ponta introdutora no líquido a ser utilizado no procedimento.
O produto deve ser aplicado e supervisionado por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas deste tipo de produto. Este procedimento requer que se realize uma análise profunda da necessidade de aplicação deste tipo de produto, devendo ser monitorado pelo profissional durante a aplicação e o tempo que dure o tratamento do paciente.
Evite a aplicação de força excessiva durante a inserção do produto.
O produto é inserido de acordo com os procedimentos padronizados pela equipe médica.
Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.
Verifique se o produto se encaixou adequadamente.
Produto de Uso Único – Destruir após o uso

Precauções, restrições e advertências:

- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

Imagens:

BIOART AF – 2 e 4 vias, com conexão em Luer lock ou graduado.



NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOTEC
BIOART AF – 2 VIAS	Equipo de irrigação, com 2 vias ponta introdutora/ perfurador com tampa, pinça corta – fluxo em todas as extensões, acoplamento tipo Y, conector GRADUADO	00.015.001
BIOART AF – 2 VIAS	Equipo de irrigação, com 2 vias ponta introdutora/ perfurador com tampa, pinça corta – fluxo em todas as extensões, acoplamento tipo Y, conector LUER LOCK	00.015.029
BIOART AF – 4 VIAS	Equipo de irrigação, com 4 vias ponta introdutora/ perfurador com tampa, pinça corta – fluxo em todas as extensões, acoplamento tipo Y, conector GRADUADO	00.015.002
BIOART AF – 4 VIAS	Equipo de irrigação, com 4 vias ponta introdutora/ perfurador com tampa, pinça corta – fluxo em todas as extensões, acoplamento tipo Y, conector LUER LOCK	00.015.030