

INSTRUÇÃO DE USO

Coletores Universais Estéreis

■ 1. USO PRETENDIDO

Os **Coletores Universais Estéreis** são utilizados para retenção, preservação e transporte de amostras de biológicas para análises bioquímicas em laboratórios de análises clínicas. Para uso em diagnóstico *in vitro*.

■ 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os **Coletores Universais Estéreis** são fabricados em polipropileno transparente e possuem tampas fabricadas em polietileno de alta densidade e com sistema de vedação tipo rosca para facilitar o transporte e evitar perda das amostras. Os coletores são estéreis por óxido de etileno (ETO) ou por radiação gama.

■ 3. INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Transportar e armazenar os coletores entre 4°C e 25°C, em local seco e arejado.

■ 4. PRECAUÇÕES

1. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada.
2. Descartar conforme as legislações e normas em vigor.
3. Em caso de dúvidas, consultar o laboratório responsável pelo exame.
4. Crianças devem utilizar o produto com a supervisão de um adulto.

■ 5. VALIDADE

Esterilização	Validade
Óxido de Etileno	2 anos a partir da data de esterilização
Radiação Gama	3 anos a partir da data de esterilização

■ 6. TIPO DE AMOSTRA

Urina.

■ 7. COLETA E MANUSEIO DAS AMOSTRAS

1. Coletar preferencialmente a primeira urina da manhã.

2. Fazer a higiene da genitália com água e sabão, enxaguar bem e secar.
3. Desprezar o primeiro jato de urina.
4. Coletar o jato médio, fechar o coletor e levar ao laboratório.
5. Desprezar o restante da urina no vaso sanitário, caso necessário.

■ 8. GARANTIA

A Firstlab Produtos para Laboratórios garante que os **Coletores Universais Estéreis** em condições normais de operação, não apresentam defeitos de material ou mão-de-obra por um período de 12 meses a partir da data de compra. Esta garantia exclui danos resultantes de transporte, mau uso, descuido ou negligência. A responsabilidade da Firstlab Produtos para Laboratórios referente à garantia do produto é limitada ao recebimento de evidências de que o defeito encontrado está dentro dos termos de garantia citados acima. Todas as reivindicações em relação à garantia devem ser apresentadas dentro de um ano a partir do recebimento desta unidade.

■ 9. FABRICADO POR

Firstlab Industria Importação e Exportação Produtos para Laboratórios Ltda.

Av. Rui Barbosa, 5525, Bloco B, Galpões 1 e 2 - São José dos Pinhais - PR - CEP: 83.040-550 | CNPJ: 27.089.709/0001-61

Telefone: (41) 3083-6551

■ 10. DISTRIBUÍDO POR

Firstlab Industria Importação e Exportação Produtos para Laboratórios Ltda.

Av. Rui Barbosa, 5525, Bloco B, Galpões 1 e 2 - São José dos Pinhais - PR - CEP: 83.040-550 | CNPJ: 27.089.709/0001-61

Telefone: (41) 3083-6551 / 0800 710 0888 | E-mail: atendimento@firstlab.ind.br

Website: www.firstlab.ind.br



Kasvi Importação e Distribuição de Produtos para Laboratório Ltda.

Av. Rui Barbosa, 5525, Bloco B, Galpões 3 e 4 - São José dos Pinhais – PR – CEP: 83.040-550 | **CNPJ:** 13.324.282/0001-24

Telefone: (41) 3535-0900 / (41) 3535-0901 | **E-mail:** kasvi@kasvi.com.br

Website: www.kasvi.com.br

■ **11. REGISTRO ANVISA**

81628880008.

■ **12. RESPONSÁVEL TÉCNICA**

Ayná dos Santos Mendes | CRBio - 66.772/07-D