

Cadastro / Registro M.S.:

10369460103

Modelos cadastrados:

- V-tube labor import com aditivo - esr - embalagem com 100 (cem) tubos. Dimensões e volumes (11 x 120)mm 1,6ml (13 x 75)mm – 1,6ml, 2ml, 3,2ml e 5ml. Código de cor – **preto**
- V-tube labor import seco - embalagem com 100 (cem) tubos. Dimensões e volumes. (13 x 75mm) - 2ml, 3ml, 4ml e 5ml (16 x 100mm) – 9ml e 10ml. Código de cor – **vermelha**
- V-tube labor import com aditivo- plasma (heparina sódica) - embalagem com 100 (cem) tubos. Dimensões e volumes (13 x 75)mm – 2ml, 3ml e 5ml, (13 x 100)mm – 6ml e 7ml. Código de cor – **verde**
- V-tube labor import com aditivo-plasma (heparina lítio) c/gel separador - embalagem com 100 (cem) tubos. Dimensões e volumes (13 x 75)mm – 2ml, 3ml e 5ml, (13 x 100)mm – 6ml e 7ml. Código de cor – **verde**
- V-tube labor import com aditivo - edta k2/k3 - embalagem com 100 (cem) tubos. Dimensões e volumes (13 x 75)mm – 1,8ml, 2ml, 3ml, 4ml, 4,5ml e 5ml, (13 x 100)mm – 7ml. Código de cor – **roxo**
- V-tube labor import com aditivo - edta k2/k3 com gel separador - embalagem com 100 (cem) tubos. Dimensões e volumes (13 x 100ml) - 5ml e 7ml
- V-tube labor import com aditivo - edta k2/k3 com gel separador - embalagem com 100 (cem) tubos. Dimensões e volumes (13 x 75) mm – 1,8ml, 2ml, 3ml, 4ml , 4,5ml e 5ml (13 x 100)mm – 7ml. Código de cor - **roxo**
- V-tube labor import com aditivo - glicose (fluoreto de sódio) - embalagem com 100 (cem) tubos. Dimensões e volumes - (13 x 75) mm – 1,8ml, 2ml, 2,5ml, 4ml e 5ml. Código de cor – **cinza**
- V-tube labor import com aditivo – glicose (fluoreto de sódio/oxalato de potássio) - embalagem com 100 (cem) tubos. Dimensões e volumes - (13 x 75) mm – 2,5ml, 4ml e 5ml. Código de cor – **cinza**
- V-tube labor import c/ aditivo–glicose (fluoreto de sódio/ edta k2 ou k3) - embalagem com 100 (cem) tubos. Dimensões e volumes. (13 x 75) mm – 2,5ml, 4ml e 5ml. Código de cor – **cinza**
- Apresentação/modelo
- V-tube labor import com aditivo coagulação (citrato de sódio) - embalagem com 100 (cem) tubos. Dimensões e volumes - (13 x 75) mm – 1,8ml, 3,6ml, 4ml, 4,5ml e 5ml. Código de cor – **azul**
- V-tube labor import com gel separador - embalagem com 100 (cem) tubos . Dimensões e volumes (13 x 75)mm – 3,5ml, 4ml e 5ml (13 x 100)mm – 5ml e 6ml e (16 x 100)mm – 8,0 e 8,5ml. Código de cor – **amarela**
- Tubo para coleta de sangue a vácuo v-tube labor import com ativador de coágulo - embalagem com 100 (cem) tubos. (13 x 75)mm – 2ml, 3ml , 4ml e 5ml e (16 x 100)mm – 9ml e 10ml. Código de cor – **vermelha**
- Tubo para coleta de sangue a vácuo v-tube labor import com gel separador - (13 x 100) mm - 5ml
- Tubo para coleta de sangue a vácuo v-tube labor import com aditivo - coagulação (citrato de sódio) - embalagem com 100 (cem) tubos - (13 x 75)mm - 2ml, 3ml, 4ml e 5 ml; (16 x 100)mm - 9ml e 10 ml - código de cor – **vermelha**
- Tubo duplo para coleta de sangue a vácuo v-tube labor import com aditivo - coagulação - embalagem com 100 (cem) tubos com parede dupla (tubo duplo) - (13 x 75)mm - 1,8ml, 3,6ml, 4ml, 4,5ml, e 5ml - código de cor - **azul**

Indicação de Uso:

O tubo para coleta de sangue a vácuo V-Tube Labor Import é utilizado para a coleta de sangue destinado a análises clínicas.

Instrução de uso:

1. Sentar o paciente no posto de coleta o mais confortável possível.
2. Instalar o garrote na parte superior do braço.
3. Realizar assepsia no local com álcool a 70%.
4. Efetuar a punção venosa, com o auxílio de adaptador para coleta.
5. Coletar o sangue no tubo devidamente identificado e codificado de acordo com as normas do laboratório clínico.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

- **Condições de armazenamento:** Conservar a temperatura entre 15° - 30°C.
Descarte: Após o uso da amostra biológica, descartar o tubo devidamente identificado e codificado de acordo com as normas do laboratório clínico.

Advertência/Precaução:

- **Advertências:**
Se o sangue não flui, verificar o local da punção, a agulha e o adaptador.
Soltar o garrote.
Reiniciar o procedimento desde o início.

Validade:

18 meses.

Contraindicação:

Não se aplica.

Importado/ Distribuído:

Importador:

Matriz: Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda.
Rua Padre Damaso, 173,165 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40

SAC: 0800 6658007

Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo – CRF/SP: 41067

Fabricante: AB MEDICAL CO. LTD

Sauphwa 4- Dong 102 Gwang-ju Techno Park

Gwagi-ro 333 Buk-gu Gwang-ju City

Coréia do Sul

Versão I resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173,165 e 187 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525