

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **TUBO PARA COLETA DE SANGUE COM EDTA**

- Contém 50 unidades
- Cor da Tampa: Roxa
- Dimensão do tubo: 13 X 75 mm
- Volume do tubo: 2 ml, 3 ml ou 4 ml
- Tampa: goma

**Composição:** Polipropileno (PP), Elastômero Termoplástico e EDTA K3.

**Finalidade:** O Tubo para Coleta de Sangue com EDTA e Tampa Goma é utilizado como um apoio à coleta de sangue feita com seringa em pacientes que possuem vasos sanguíneos frágeis, como crianças e idosos. O tubo acondiciona o sangue e inibe sua coagulação, assim permitindo que a amostra seja preservada por um período mais longo sem alteração do seu estado original.

#### **Modo de usar:**

A coleta da amostra de sangue com seringa deve ser efetuada de acordo com o protocolo da unidade de saúde. Após a coleta:

1. Abrir a tampa do tubo;
2. Transferir o sangue até a indicação de volume do tubo;
3. Fechar o tubo com a tampa;
4. Agitar o tubo delicadamente de 5 a 8 vezes, por inversão de 180°;
5. Encaminhar a amostra para o local onde será realizada a análise.

#### **Precauções, Cuidados e Advertências**

Utilizar exclusivamente para análise de laboratório.

Não utilizar o produto caso esteja danificado ou fora do prazo de validade.

Manter o produto longe de fonte de calor e da luz direta do sol.

#### **VERIFICAR A INTEGRIDADE DE CADA EMBALAGEM ANTES DO USO.**

#### **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Armazenar e transportar o produto em sua embalagem original, em local seco e arejado e protegido da luz do sol.

**Descarte:** Descartar o material em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

**PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO DE USO ÚNICO.**  
**DESCARTAR APÓS O USO.**

#### **Fabricado por:**

**FL Medical S.R.L.**

Via Enrico Mattei, 20 – 35038- Torreglia (Padova)

**ITÁLIA**

#### **Distribuído por:**

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

Rua San José, 305 - Parque Industrial San José

06715-862 – Cotia – SP

Brasil

CNPJ 48.740.849/0001-28

Responsável técnica - Dra. Daniela Freitas Amorim – COREN-SP Nº 151479

☎ SAC (Serviço de atendimento ao consumidor):  
(11) 2712-7000 - e-mail: sac@cralplast.com.br

REVISÃO 00 DE 11/2013