



CATGUT SIMPLES

Descrição

A sutura de Catgut Simples é uma sutura cirúrgica absorvível de origem animal, serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes, purificadas de forma mecânica, física e quimicamente, resultando em fios de coloração amarelo palha, podendo ser providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Sutures Cirúrgicas absorvíveis.

Indicação

A sutura do Catgut Simples é indicada para uso em: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo, Urologia.

Ação

A sutura de Catgut Simples causa uma resposta inflamatória nos tecidos, a qual é seguida por encapsulamento gradual da sutura pelo tecido conjuntivo. A sutura do Catgut Simples é absorvida sem que ocorra qualquer mudança significativa na retensão da força tênsil “in vivo”.

Contra-Indicação

É contra indicado em procedimentos onde haja o contato prolongado com soluções salinas como as encontradas no trato biliar e urinário, podendo resultar na formação de cálculos.

Cuidados

O dispositivo só poderá ser utilizado por ou sob orientação de cirurgião, segundo técnicas cirúrgicas aplicáveis e só deverá ser manipulado por pessoal qualificado. Não re-esterilizar, descartar produto aberto e não utilizado, descartar sobras e não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou molhada. Descartes de suturas utilizadas: adotar medidas de biosegurança e descarte internos, considerando risco de contaminação biológica por materiais perfurocortantes. Descarte de suturas não utilizadas: adotar medidas de descarte internos para materiais perfurocortantes. Na manipulação deste produto deve-se tomar cuidados para que seja feito de modo asséptico. Não utilizar o produto além do prazo de validade.

Precauções

Na manipulação desta ou qualquer outro tipo de sutura cirúrgica, deve-se tomar cuidados para não danificar a sutura. Evitar o dobramento e esmagamento das agulhas, pelo manuseio inadequado de pinças e porta-agulhas.

Instruções de Uso

Utilizar a quantidade de sutura necessária, de acordo com a extensão da ferida cirúrgica e técnica adotada pelo cirurgião.

Reações Adversas

Ocasionalmente pode ocorrer eritema, leve dor no local da sutura causado pelo trauma da ferida cirúrgica no tecido.

Conservação

Recomenda-se conservar à temperatura de 20 a 30°C, ao abrigo da luz solar, livre de poeira, umidade e intempéries, em sua embalagem original. Transportar em veículos fechados, que protejam o produto de sol e chuva.

Apresentação

A sutura Catgut Simples é apresentada nos N°s cirúrgicos de 9-0 a 4, métrico 0,4 a 8. Apresenta-se em comprimentos pré-estabelecidos, sem agulhas ou com uma ou duas agulhas de diferentes tipos

Validade

A sutura de Catgut Simples tem validade de 3 (três) anos, após a data de fabricação.

CAIXA COM 12, 24 e/ou 36 ENVELOPES

PRODUTO DE USO ÚNICO.

NÃO RE-ESTERILIZAR.

ESTÉRIL.

DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA

SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.

FÁBRICA - AV. HERMÓG. COELHO, 3523 - ALTO DA BOA VISTA

CEP 76100-000 - FONE: (64)3671-1453 - FAX: (64)3601-1576

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Farmacêutica Responsável:

Drª CÍNTIA FLORENTINO DE CASTRO COSTA - CRF-GO 6035

VENDAS - AV. C-255 N° 270-SALAS: 606/611

CENTRO EMPRESARIAL SEBBA - NOVA SUIÇA

CEP: 74280-010 - FONE/FAX:(62)3259-4546 - GOIÂNIA - GO

Registro no Ministério da Saúde N° 10243410012 (Agulhado) e

N° 10243410021 (Não Agulhado)