



LINHO

Descrição

A sutura de Linho é uma sutura cirúrgica do tipo não absorvível de origem vegetal. Suas fibras são processadas resultando em fios de polifilamentos de cor branca, torcidos de alta resistência tênsil providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Sutures Cirúrgicas não absorvíveis.

Indicação

Incisões cirúrgicas; Cirurgias Gerais; Ginecologia/Obstetrícia; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Plásticas.

Ação

A sutura do Linho causa uma resposta inflamatória nos tecidos, a qual é seguida por encapsulamento gradual da sutura pelo tecido. A sutura do Linho não é absorvida, e não ocorre qualquer mudança significativa na retensão da força tênsil "in vivo".

Contra-Indicação

O produto é contra indicado em procedimentos onde haja o contato prolongado com soluções salinas como as encontradas no trato biliar e urinário, podendo resultar na formação de cálculos.

Cuidados

O dispositivo só poderá ser utilizado por ou sob orientação de cirurgião segundo técnicas cirúrgicas aplicáveis e só deverá ser manipulado por pessoal qualificado. Não re-esterilizar, descartar produto aberto e não utilizado, descartar sobras e não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou molhada. Descartes de suturas utilizadas: adotar medidas de biosegurança e descarte internos, considerando risco de contaminação biológicas e materiais perfurocortantes. Descarte de suturas não utilizadas: adotar medidas de descarte internos para materiais perfurocortantes. Na manipulação deste produto deve-se tomar cuidados para que seja feito de modo asséptico. Não utilizar o produto além do prazo de validade.

Precauções

Na manipulação desta ou qualquer outro tipo de sutura cirúrgica, deve-se tomar cuidados para não contaminar os fios, manipular em local asséptico, para não danificar a sutura. Evitar o dobramento e esmagamento das agulhas pelo manuseio inadequado de pinças e porta-agulhas.

Instruções de Uso

Utilizar a quantidade de sutura necessária, de acordo com a extensão da ferida cirúrgica e técnica adotada pelo cirurgião.

Reações Adversas

Ocasionalmente pode ocorrer eritema, leve dor no local da sutura causado pelo trauma da ferida cirúrgica no tecido.

Conservação

Recomenda-se conservar a temperatura de 20 a 30°C, ao abrigo da luz solar, livre de poeira, umidade e intempéries, em sua embalagem original. Transportar em veículos fechados, que protejam o produto de sol e chuva.

Apresentação

A sutura do Linho é apresentada nos N°s cirúrgicos de 10-0 a 7, conforme monografia da Farmacopéia Brasileira. A sutura é apresentada estéril em comprimentos pré-estabelecidos, encastoadas em vários tipos de agulhas.

Validade

A sutura de Linho tem validade de 5 anos, após a data de fabricação.

CAIXA COM 24 ENVELOPES

PRODUTO DE USO ÚNICO.

NÃO RE-ESTERILIZAR.

ESTÉRIL.

DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO.

SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.

FÁBRICA - AV. HERMÓG. COELHO, 3523 - ALTO DA BOA VISTA

CEP 76100-000 - FONE: (64)3671-1453 - FAX: (64)3601-1576

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Farmacêutica Responsável:

D^{ra} CÍNTIA FLORENTINO DE CASTRO COSTA - CRF-GO 6035

VENDAS - AV. C-255 N° 270-SALAS: 606/611

CENTRO EMPRESARIAL SEBBA - NOVA SUIÇA

CEP: 74280-010 - FONE/FAX:(62)3259-4546 - GOIÂNIA - GO

Registro no Ministério da Saúde N° 10243410011