

RESPIRADOR PFF2

Fabricado e Distribuído por: MEDI COMPANY EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.

CNPJ: 37.787.749/0001-30

Endereço: Rua Edgard Ajax dos Reis, Nº 274 - Novo Parque São Vicente – CEP: 16200-318 – BIRIGUI/SP

NÚMERO PROCESSO ANVISA: 25351.330870/2021-94

REGISTRO ANVISA: 82200480002

Indicação de Uso: Proteção contra poeira, névoas, fumos metálicos e aerossóis sólidos e líquidos à base de água.

- Modo de Uso:**
1. Abra o respirador;
 2. clipe nasal para cima;
 3. pressione o clip nasal sobre o nariz;
 4. ajuste o respirador para obter a proteção.

Advertências e Precauções: Se o respirador se danificar ou sujar, ou se a respiração se tornar difícil (isso indica que o filtro está saturado) abandone imediatamente a área contaminada e descarte o respirador. Deficiência de vedação devido a características faciais, barba, cicatrizes presentes no rosto do usuário na área de vedação da PFF2.

