

Indaclor 1%

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% (p/p) DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL.
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO
USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
ANTES DE USAR, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

INDICAÇÃO:

O INDACLOR 1% (10.000 ppm de cloro ativo) é uma solução a base de hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo. Destina-se a desinfecção de Superfícies Fixas, Artigos não Críticos e para desinfecção de materiais de inaloterapia e assistência respiratória em unidades de saúde. Eficácia comprovada contra: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomona aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Candida albicans*, *Mycobacterium smegmatis*, *Mycobacterium bovis* e *Candida auris*.

COMPOSIÇÃO:

Hipoclorito de sódio 1% e água qsp. 100%.

INSTRUÇÕES DE USO:

Desinfecção de Superfícies Fixas: Deve ser aplicado puro com auxílio de um pano ou mop sobre a superfície a ser tratada. Deixar em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

Desinfecção de Artigos não Críticos: lavar, enxaguar e secar os artigos. Colocar os artigos no INDACLOR 1% puro, deixando imerso por 10 minutos. Retirar os artigos, enxaguar e secar.

Desinfecção de materiais de inaloterapia e assistência respiratória: lavar, enxaguar e secar os artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. Imergi-los no INDACLOR 1% puro, deixando em contato por 30 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

ADVERTÊNCIAS:

Não ingerir. Não inale vapores/aerossóis. Evite contato com a pele e olhos. Ao manusear o produto, utilizar equipamento de proteção (máscaras, luvas, óculos e aventais). Não beber, comer ou fumar durante o manuseio do produto.

RESTRIÇÕES DE USO:

Não se aplica.

PRECAUÇÕES:

Não misturar com outros produtos. Não misturar com produtos à base de amônia. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Não deve ser utilizado em objetos de mármore ou metálico. Mantenha o produto em sua embalagem original.

PRIMEIROS SOCORROS:

EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (0800 722 6001). Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Tratamento específico. Contém Hipoclorito de Sódio.

LOTE E VALIDADE:

Lote/Fabricação: verificar embalagem.

Validade: 12 meses.

APRESENTAÇÕES:

1L - 12 FRASCOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;

5L - 4 GALÕES DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;

20L - BOMBONA PLÁSTICA DESCARTÁVEL;

50L - BOMBONA PLÁSTICA DESCARTÁVEL.

**Algumas apresentações, venda sob consulta.*

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:

ASPECTO: Líquido límpido

COR: Amarelo-pálido-esverdeado

ODOR: Característico de cloro

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

PH: 10,00 a 14,00

DENSIDADE (g/cm³): 1,0000 a 1,1000

DOSEAMENTO (%): maior ou igual a 1,00

REGISTRO ANVISA:

Núm. Aut. ANVISA/MS 3.02637.0

Indaclor -Hipoclorito de Sódio 1% - 1L

Registro na Anvisa/M.S.: 32637.0015/001-0

Indaclor -Hipoclorito de Sódio 1% - 5L

Registro na Anvisa/M.S.: 32637.0015/002-9

Indaclor -Hipoclorito de Sódio 1% - 20L

Registro na Anvisa/M.S.: 32637.0015/003-7

Indaclor -Hipoclorito de Sódio 1% - 50L

Registro na Anvisa/M.S.: 32637.0015/003-7



EMPRESA CERTIFICADA PELA ANVISA
EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.

Av. Saudade, 434 - Centro - Dores do Indaiá - MG - CEP: 35.610-000

Telefax: (37) 3551-2305 - CNPJ: 04.654.861/0001-44

site: www.indalabor.com.br - e-mail: indalabor@indalabor.com.br