

## PERACÉTICO ECO 0,20%

DESINFETANTE À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO /DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL – ASSISTÊNCIA Á SAÚDE.

### 1. INTRODUÇÃO

**Descrição do produto:** É um desinfetante de alto nível para artigos semi-críticos. À base de Ácido Peracético, é indicado para desinfecção de alto nível de endoscópios, e desinfecção de nível intermediário, são indicados o material para inaloterapia, assistência ventilatória, além dos artigos não críticos.



### 2. INDICAÇÃO

É um desinfetante de alto nível para equipamentos e dispositivos médicos cirúrgicos, termossensíveis, endoscópios, além dos artigos não críticos.

### 3. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Aspecto:**.....Líquido límpido  
**Cor:**.....Incolor  
**Odor:**.....Irritante  
**pH(1%):**.....2,0 – 3,0  
**Teor de Ativo:**.....0.17 – 0.23%

### 4. MODO DE USAR

Não é necessário o uso de ativador. Para desinfecção de artigos semicríticos: lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na solução deixando em contato por 30 min. Devem ser completamente submersos no produto e com todos os lumes preenchidos. Deve-se ter cuidado com a formação de bolhas que impedem o contato da solução com o artigo. As reentrâncias, tubulações e partes mais difíceis devem ser preenchidas com a solução utilizando seringa, se for necessário. Enxaguar e secar os artigos. Utiliza-los o mais breve possível. Para desinfecção de artigos não críticos: lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na solução deixando em contato por 30 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível. Para desinfecção de superfícies fixas: lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto puro, deixando em contato por 30 minutos. Não precisa enxaguar. Secar a superfície.

### 5. APRESENTAÇÃO

PERACÉTICO ECO é comercializado em embalagens de 1 e 5 Litros.

TIPO DE EMBALAGEM	CÓDIGO DE BARRAS UNITÁRIO	CÓDIGO DE BARRAS/CAIXA
Frasco 01 litro	7898919553136	97898919553139
Galão 05 litros	7898919553051	97898919553061

### 6. MINISTÉRIO DA SAÚDE

Produto saneante registrado na ANVISA/MS, Nº 3277.00040.

### 7. GARANTIA

Em caso de dúvidas, acesse o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo site: [www.nowquimica.com.br](http://www.nowquimica.com.br).