

# FICHA TÉCNICA – AVENTAIS ESTÉREIS

## AVENTAL GG

Avental cirúrgico tamanho grande, atóxico e hipoalergênico, 100% polipropileno na cor azul, processo SMS gramatura média 40g/m2.

Apresentação: caixa com 25 unidades

### Descrição

---

#### Contém:

Um avental cirurgico estéril tamanho GG.

#### Descrição do produto:

Avental cirúrgico tamanho Grande, atóxico e hipoalergênico, 100% polipropileno na cor azul, processo SMS gramatura média 40g/m2.

#### Advertências:

Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.

#### Armazenamento:

Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto.

#### Produto estéril:

Após o processo de esterilização por óxido de etileno, esta embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril.

#### Instruções de uso:

Avental cirúrgico pronto para o uso. Deve-se obedecer corretamente às normas de biossegurança. Abra o pacote sobre a mesa, preferencialmente primeiro o lado superior e inferior e após o direito e esquerdo. O cirurgião deve vestir o avental cirúrgico, entregando a etiqueta vermelha e branca que está presa na frente do avental na altura da cintura ao auxiliar. Com o auxiliar segurando a etiqueta, gire o corpo cento e oitenta graus e puxe o cordão, que deve se soltar da etiqueta e amarre o avental.

Registro ANVISA n.º 80086720019

Responsável Técnico: Dr. Carlos Gilberto Almodin – CRM/PR 7499

## AVENTAL M

Avental cirúrgico tamanho médio, atóxico e hipoalergênico, 100% polipropileno na cor azul, processo SMS gramatura média 40g/m2.

Apresentação: caixa com 25 unidades

### Descrição

---

#### Contém:

Um Avental Cirúrgico tamanho médio.

#### Identificação do produto:

Avental cirúrgico tamanho Médio, atóxico e hipoalergênico, 100% polipropileno na cor azul, processo SMS gramatura média 40g/m2.

#### Produto estéril:

Após o processo de esterilização por óxido de etileno, esta embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril.

Produto hospitalar de uso único, descartar após o uso.

#### Armazenamento:

Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto.

#### Instruções de uso:

Avental cirúrgico pronto para o uso. Deve-se obedecer corretamente às normas de biossegurança. Abra o pacote sobre a mesa, preferencialmente primeiro o lado superior e inferior e após o direito e esquerdo. O cirurgião deve vestir o avental cirúrgico, entregando a etiqueta vermelha e branca que está presa na frente do avental na altura da cintura ao auxiliar. Com o auxiliar segurando a etiqueta, gire o corpo cento e oitenta graus e puxe o cordão, que deve se soltar da etiqueta e amarre o avental.

Precauções: não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.

Registro ANVISA n.º 80086720021

Responsável Técnico: Dr. Carlos Gilberto Almodin – CRM/PR 7499