

AGULHA PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO

Cadastro / Registro M.S.:

80495519049

Modelos

21G, 22G;

Indicação de uso

As agulhas para coleta múltipla são indicadas para coleta de sangue com tubo de coleta de sangue a vácuo, adequado para coletar amostras de sangue de veias humanas, durante a análise clínica.

Especificação técnica

Tampa protetora agulha 1: PE (Polietileno)

Tampa protetora agulha 2: PP (Polipropileno)

Eixo/cubo da agulha: ABS (Acrilonitrila butadieno estireno)

Manguito emborrachado: Borracha Natural isento de látex

Agulha: Aço inoxidável 304

Agulha siliconada com óleo de silicone de grau médico, inerte e atóxico

Validade 5 anos a partir da data de esterilização

Esterilizada à óxido de Etileno

Modelos:

21G 1" - 25mmx0,80mm – verde - ângulo de bisel longo, trifacetado

22G 1" - 25mmx0,70mm – preto – ângulo de bisel longo, trifacetado

Apresentação

Embalagem Primária: Acondicionadas em caixa contendo 100 unidades.

Embalagem Secundária: Caixas de Papelão contendo 100 unidades de agulhas cada.

Orientações de Uso

Realizar a antisepsia no local da punção com álcool swab;

Romper o lacre da agulha;

Encaixar a agulha no adaptador do sistema a vácuo;

Retirar a proteção que recobre a agulha de coleta múltipla;

Realizar a punção venosa e a coleta encaixando o tubo a vácuo;

Após a retirada do último tubo remover a agulha;

Descartar a agulha imediatamente após o uso, em recipiente para materiais perfurocortantes, conforme legislação vigente.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”

Verifique a integridade da embalagem, caso ela apresente sinais de abertura não utilizar;

Utilizar técnicas assépticas antes e durante o procedimento;

Descartar em locais apropriados, conforme a legislação vigente da vigilância sanitária local;

Armazenar em locais limpos, secos, livres dos raios solares e vapores químicos.

A agulha intravenosa e a extremidade da agulha oposta ao paciente são estéreis.

Este produto não possui conexão tipo luer e, portanto, não é conectável com seringas hipodérmicas.

Este produto não é indicado para a inserção de substâncias líquidas por via intravenosa ou intramuscular ou hipodérmica.

Este produto não é uma agulha hipodérmica.

Se o sangue não fluir, verificar o local da punção, a agulha e o adaptador, soltar o garrote e reiniciar o procedimento desde o início.

Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br | medixbrasil



Ler as instruções de uso antes de utilizar o produto.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC Nº 185 de 22.10.2001

RDC 40/2015

RDC Nº665 de 30 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13

7898652375866 – 21G

7898652375873 – 22G

EAN14

17898652375863

17898652375870

Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 00 de 19/12/2022

Imagens meramente ilustrativas:



Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br    medixbrasil

