

## MEDIX BRASIL CATETER TIPO ÓCULOS DESCARTÁVEL

### Cadastro / Registro M.S.

80495519027

### Modelos

Adulto – 1,4m

### Indicação de uso

É um dispositivo de transporte de oxigênio, utilizado no fornecimento de oxigênio suplementar a pacientes que precisem de elevação na concentração de oxigênio.

### Especificação técnica

Confeccionado em PVC grau médico, atóxico, apirogênico, inodoro com tubo transparente maleável. Possui conector tipo "Y", com dois tubos de acesso nasal, provido na outra extremidade de um conector padrão. Ponta macia. Estéril por Óxido de Etileno

Modelos:

Medix Brasil Cateter Tipo Óculos Descartável – comprimento aprox. 1,4m.

### Apresentação

Embalagem primária: embalado individualmente em polybag;

Embalagem secundária: caixa de embarque contendo 100 unidades.

### Orientações de Uso

1. Antes de usar, verifique o produto quanto a danos e contaminação;
2. Antes do uso, verifique a especificação do produto se está consistente com a especificação esperada;
3. Selecione o tamanho ideal do produto de acordo com o paciente;
4. Orientar o paciente a realizar a higienização das fossas nasais;
5. Abrir a embalagem do produto de maneira asséptica;
6. Introduza cuidadosamente e adapte o produto nas narinas do paciente;
7. Ajuste o tubo na parte posterior das orelhas para que possam servir de apoio;
8. Conectar o cateter nasal ao tubo de oxigênio/extensor;
9. Conectar o tubo ao fluxômetro e ajustar conforme orientação médica;
10. Após o uso descartar em local adequado.

### Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Descartar e não usar quando as embalagens chegarem previamente abertas ou danificadas.

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

### Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte.

#### Matriz

- +55 45 3039 4242
- Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

- +55 47 3439 2114
- BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC
- medixbrasil.com.br
- medixbrasil



O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

#### **Normas técnicas**

ISO 13485:2016

RDC Nº 185 de 22.10.2001

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

#### **Códigos de barra**

EAN13

7898652373268

EAN14

17898652373265

#### **Importado e distribuído por:**

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

#### **Responsabilidade Técnica**

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

#### **Serviço de Atendimento ao Consumidor**

[sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

0800 006 3036

Revisão 00 de 20/12/2022

Imagens meramente ilustrativas:



#### **Matriz**

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### **Filial**

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

[medixbrasil.com.br](http://medixbrasil.com.br)    medixbrasil