

## GARROTE (TORNIQUETE) COM TRAVA

### Cadastro / Registro M.S.:

80495510143

### Modelos

Adulto e infantil.

### Indicação de uso

É usado para fixar a veia na coleta de sangue ou transfusão de sangue, bem como punção venosa para outros fins médicos.

### Especificação técnica

Composição: fabricado em borracha sintética (Copolímero de estireno-butadieno)

Consiste em fivela e elástico

Trava de segurança com dois estágios: 1º alívio / 2º retirada

Não estéril

Antialérgico

Reutilizável

### Modelos:

Adulto: 45cm x 2,5cm - Cor: Laranja ou Azul

Infantil: 35cm x 2,5cm - Cor: Estampado

Validade: 3 anos após a data de fabricação.

### Apresentação

Embalagem Primária: Caixa com 50 unidades cada

Embalagem de Transporte: Caixas de papelão contendo 10 caixas com 50 unidades cada.

### Orientações de Uso

1. Abra a embalagem e retire o torniquete; espalhe-o com a fivela para cima; contorne-o no local adequado do cotovelo.
2. O garrote deve ser colocado no braço do paciente próximo ao local da punção (4 a 5 dedos ou 10 cm acima do local de punção), sendo que o fluxo arterial não poderá ser interrompido. Para tal, basta verificar a pulsação do paciente. Mesmo garroteado, o pulso deverá continuar palpável.
3. Aperte a fivela;
4. Puxe a alça para fazer a tira resiliente no aperto correto.
5. O garrote não deve ser deixado no braço do paciente por mais de um minuto. Deve-se retirar ou afrouxar o garrote logo após a venipunção, pois o garroteamento prolongado pode acarretar 4, 5 alterações nas análises
6. Pressione o botão na fivela ao soltar o torniquete e a fivela se soltará automaticamente.
7. Pode ser usado repetidamente após a desinfecção com ozônio sob baixa temperatura.

### Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

Verifique a integridade da embalagem, caso ela apresente sinais de abertura não utilizar;  
Utilizar técnicas assépticas antes e durante o procedimento;  
Descartar em locais apropriados, conforme a legislação vigente da vigilância sanitária local;  
Armazenar em locais limpos, secos, livres dos raios solares e vapores químicos.  
Não aplicar pressões elevadas que possam prejudicar o fluxo do sangue para a extremidade.  
Liberar o torniquete assim que o sangue começar a fluir no primeiro tubo.  
Estase muito prolongada pode contribuir para a hemólise.  
Não utilizar o torniquete em pele que apresente ferimento.  
Ler as instruções de uso antes de utilizar o produto  
Torniquetes perdem facilmente a forma sob alta temperatura.

#### Matriz

+55 45 3039 4242  
Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

+55 47 3439 2114  
BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br medixbrasil



Este produto está sujeito a desgaste e se deteriora com o uso. É essencial que este dispositivo seja inspecionado antes de cada uso.

### Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

### Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC Nº 185 de 22.10.2001

RDC 40/2015

RDC Nº665 de 30 de março de 2022

### Códigos de Barra

EAN13

7898652376726 – Adulto Azul

7898652375774– Adulto Laranja

7898652375781 - Infantil

EAN14

17898652375771

17898652376723

17898652375788

### Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

### Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

### Serviço de Atendimento ao Consumidor

[sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

0800 006 3036

Revisão 00 de 29/12/2022

Imagens meramente ilustrativas:



#### Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

[medixbrasil.com.br](http://medixbrasil.com.br)    medixbrasil



Matriz

☎ +55 45 3039 4242  
📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

☎ +55 47 3439 2114  
📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC  
🌐 [medixbrasil.com.br](http://medixbrasil.com.br) 📱 medixbrasil

