

SERINGAS HIPODÉRMICAS DESCARTÁVEIS COM AGULHA

Cadastro / Registro M.S.:

80495519081

Modelos

3mL, 5mL, 10mL, 20mL; 25X0,70 mm (22GX1) ou 25X0,60 mm (23GX1)

Indicação de uso

Desenvolvidas para a aspiração e aplicação de líquidos e/ou medicamentos em hospitais farmácias, clínicas e laboratórios pelas vias hipodérmicas.

Especificação técnica

Fabricadas em Polipropileno, polímero inerte, ou seja, não reage com medicamentos;

Estéreis – óxido de etileno

Lubrificadas com silicone: reduz a pressão, permite movimento suave do êmbolo;

Corpo transparente: permite a visualização nítida do fluído aspirado;

Anel de retenção: impede o desprendimento do êmbolo;

Êmbolo de borracha natural (contém látex)

Agulha de aço inoxidável SUS304

Com agulha: 25X0,70 mm (22GX1) ou 25X0,60 mm(23GX1);

Modelos: Bico Luer Slip e Luer Lock (central);

Tamanhos: 3/ 5/ 10/ 20ml;

Graduação:

3ml: graduação principal de 0,5 em 0,5 e a secundária de 0,1 em 0,1ml

5ml: graduação principal de 1 em 1 e a secundária de 0,1 em 0,1ml;

10ml: graduação principal de 1 em 1 e a secundária de 0,2 em 0,2ml;

20ml: graduação principal de 5 em 5 e a secundária de 0,5 em 0,5ml;

Escala volumétrica demarcada em mililitros;

Certificação INMETRO;

Validade 5 anos após data de esterilização;

Atóxicas e apirogênicas;

Descartáveis e de uso único.

Apresentação

Embalagem principal: cartucho de papelão contendo:

- 3ml: 100 unidades

- 5 ml: 100 unidades

- 10ml: 100 unidades

- 20ml: 50 unidades

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo:

- 3ml: 3000 unidades

- 5ml: 2400 unidades

-10ml: 1600 unidades

- 20ml: 800 unidades

Orientações de Uso

A escolha do calibre e tamanho da agulha, deve ser avaliado, levando-se em consideração a via de administração, o tipo de medicação, o IMC e a idade do indivíduo.

Se a agulha não estiver conectada, conecte a mesma na seringa antes do uso.

Mantenha a agulha coberta com o protetor até o momento do uso para evitar danos à ponta e contaminação da agulha.

Matriz

☎ +55 45 3039 4242

📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

☎ +55 47 3439 2114

📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

🌐 medixbrasil.com.br 📱 medixbrasil



Ao final da injeção, descarte a seringa agulhada num coletor de perfurantes e/ou cortantes, sem reencapar a seringa.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”, “NÃO DEVEM SER REUTILIZADAS”, “PROIBIDO REPROCESSAR”, “DESTRUIR APÓS O USO”, “ESTÉRIL”

“Ler atentamente as Instruções de Uso”;

Contém Látex.

A seringa suporta 300KPA, por isso não é adequada para bomba de contraste.

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/20225 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

Portaria INMETRO Nº 200

Portaria INMETRO Nº 289

RDC Nº541 de 30.08.2021

NBR ISO 7886-1:2020

Portaria INMETRO Nº 503

NBR ISO 594-1:2003

ISO 13485:2016

RDC Nº 185 de 22.10.2001

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13

7898652375620 – 3ML LOCK 25X0,60 23G 1
7898652375637 – 5ML LOCK 25X0,60 23G 1
7898652375644 – 10ML LOCK 25X0,60 23G 1
7898652375651 – 20ML LOCK 25X0,60 23G 1
7898652375583 – 3ML SLIP 25X0,60 23G 1
7898652375590 – 5ML SLIP 25X0,60 23G 1
7898652375606 – 10ML SLIP 25X0,60 23G 1
7898652375613 – 20ML SLIP 25X0,60 23G 1
7898652375705 – 3ML LOCK 25X0,70 22G 1
7898652375712 – 5ML LOCK 25X0,70 22G 1

EAN14

17898652375627
17898652375634
17898652375641
17898652375658
17898652375580
17898652375597
17898652375603
17898652375610
17898652375702
17898652375719

| | |
|---|----------------|
| 7898652375729 – 10ML LOCK 25X0,70 22G 1 | 17898652375726 |
| 7898652375736 – 20ML LOCK 25X0,70 22G 1 | 17898652375733 |
| 7898652375668 – 3ML SLIP 25X0,70 22G 1 | 17898652375665 |
| 7898652375675 – 5ML SLIP 25X0,70 22G 1 | 17898652375672 |
| 7898652375682 – 10ML SLIP 25X0,70 22G 1 | 17898652375689 |
| 7898652375699 – 20ML SLIP 25X0,70 22G 1 | 17898652375696 |

Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 00 de 26/12/2022

Imagens meramente ilustrativas:



Matriz

- +55 45 3039 4242
- Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

- +55 47 3439 2114
- BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC
- medixbrasil.com.br    [medixbrasil](https://www.instagram.com/medixbrasil)