

FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE

Composição: Papel Crepado Saturado, com tratamento em uma das faces e recoberto com adesivo à base de borracha e tinta reagente.

Apresentações: 19mm x 30m – 19mm x 50m - 19mm x 55m.

Registro Anvisa nº: ISENTO DE REGISTRO

Propriedades Físicas :

Espessura do papel cru : 38 gr/m²

Espessura total da fita crepe: 115 gr/m² +/- 10g

Alongamento : 9% +/- 2pp

Adesão ao Aço (N/25mm): Método: FTM-1 Resultado médio 2,48

Resistência a Temperatura: 140 graus Celcius / 40 minutos

Indicação de Uso e ação :

Identificação de volumes que serão esterilizados em autoclave (calor + vapor úmido em ciclos de 30 minutos a 121°C ou ciclos de 15 minutos a 132°C).

- A tinta rosa reativa reage com a temperatura e pressão da autoclave, mudando para a cor preta, indicando que passou pelo processo de esterilização em autoclave.

Instruções de uso:

Modo de Uso :

- Fixe firmemente a fita nas embalagens/volumes que serão submetidos à esterilização. Quando for aplicada em embalagens de TNT/SMS, exercer pressão maior sobre a fita e certifique-se que a mesma ficou bem colada.

Cuidados e Precauções:

- Essa fita deve ser guardada em local seco e fresco e não deve ser exposta a intempéries;
- Para a correta adesão, essa fita deve ser pressionada sobre a superfície limpa onde foi colada;
- Validade de 2 anos.

Responsable Técnico:. Christian Pretto Juchem CRA/RS 056247/O



Revisión: 27/03/25