



Catálogo




QUEM NÓS SOMOS

A Prolink Indústria Química surgiu em 1996 atuando no segmento de produtos automotivos. Em 2010, passou a produzir e comercializar produtos hospitalares, e desde 2018 vem inovando com sua linha de cosméticos. Sendo referência em soluções para higienização, limpeza e cuidados com a pele, a Prolink inova constantemente no setor químico, potencializando negócios em diversos segmentos industriais.

Localizada em uma ampla estrutura edificada com solidez e tecnologia de ponta. Conta com um laboratório de controle de qualidade e P&D equipado para realizar as mais rigorosas análises, a fim de gerar maior credibilidade e compromisso constante com a qualidade.

A tradição, inovação e qualidade dos produtos fornecidos, bem como o profissionalismo nas relações comerciais, garantem para empresa a competitividade necessária e a sua diferenciação no mercado, sempre buscando aperfeiçoamentos que transmitem a conscientização quanto à segurança, saúde ocupacional e meio ambiente.

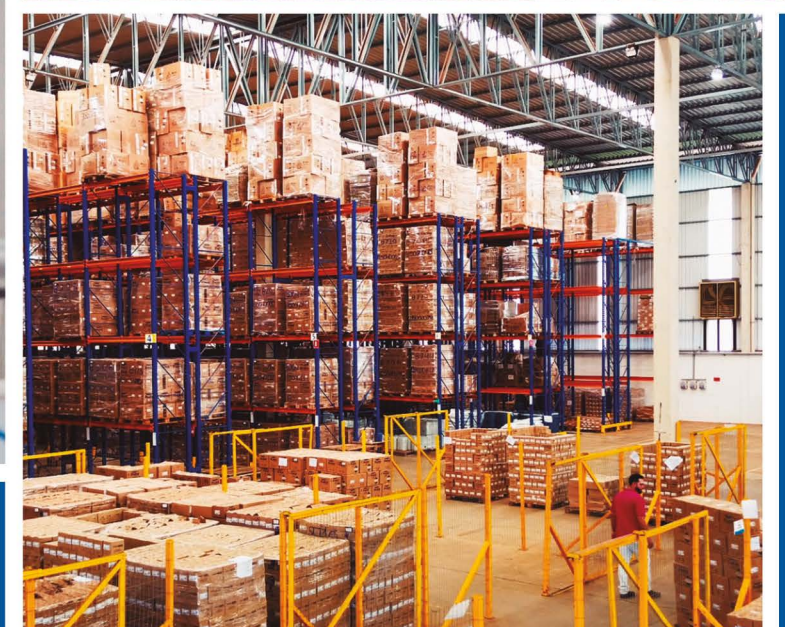

Álcool70 Prolink

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM

O **ÁLCOOL 70 PROLINK** é destinado a desinfecção de superfícies fixas em ambientes hospitalares, clínicos e farmacêuticos, além da desinfecção de artigos não críticos como: vidros, termômetros, estetoscópios, otoscópios, artigos metálicos, etc. Seu componente ativo não é corrosivo e não deixa resíduos, sendo sua aplicação simples e de uso cotidiano pelos profissionais da saúde.



Componente ativo não corrosivo



Não deixa resíduo



Aplicação simples



Eficácia contra bactérias:
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella choleraesuis

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto



Frasco Anatômico

Modo de Uso

Superfícies Fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto puro deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.
Artigos Não Críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Friccionar os artigos com o produto deixando-o umedecido por 10 minutos. Utilizá-los o mais breve possível.

Armazenamento

Conserve o produto em local seguro e protegido do calor excessivo. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Evitar contato do produto com material sensível ao álcool. Não é indicado para uso em acrílicos. Pode enrijecer borrachas e tubos plásticos. Recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados, tais como luvas, máscara, óculos de proteção e avental.
Precauções: Não ingerir. Manter afastado do fogo e do calor. Não perfurar a tampa. Não derramar sobre o fogo. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original. Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.
Primeiros Socorros: Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral à uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
Produto inflamável.

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Composição

Álcool etílico e Veículo. **Princípio ativo:** Álcool Etílico.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPLARGXALT)	CUBA. DA CX.
00344	1L	SANEANTES	24	38089429	12	326100019	7908346901162	17908346901169	0,95	11,44	34x26x26 cm	0,023
00345	5L	SANEANTES	24	38089429	4	326100019	7908346901155	17908346901152	4,63	18,51	37,5x28,5x29,5 cm	0,032

Álcool 96 Prolink

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - 92,8° INPM

O **ÁLCOOL 96 PROLINK** é um produto especialmente desenvolvido para uso na limpeza geral em estabelecimentos de assistência à saúde humana e animal. Seu componente ativo não é corrosivo, não deixa resíduos, odor característico alcoólico, sendo sua aplicação simples e de uso cotidiano pelos profissionais de saúde em geral.

Uso: Assistência à Saúde.



Não corrosivo



Não deixa
Resíduos



Fácil Aplicação



Frasco
Anatômico

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto

Modo de Uso

Proceder a aplicação do produto puro. Aplicar o produto com um pano limpo sobre a superfície do móvel, piso, vidro, parede, etc., que desejar limpar. Deixar o produto secar naturalmente.

Armazenamento

Conserve o produto em local seguro e protegido do calor. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Evitar contato do produto com material sensível ao álcool. Não é indicado para uso em acrílicos. Pode enrijecer borrachas e tubos plásticos. Recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados, tais como luvas, máscara, óculos de proteção e avental.

Precauções: Não ingerir. Manter afastado do fogo e do calor. Não perfurar a tampa. Não derramar sobre o fogo. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original. Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.

Primeiros Socorros: Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral à uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. **Produto inflamável.**

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Composição

Componente ativo: Etanol 92,8° INPM ou 96° GL.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
00346	1L	SANEANTES	24	22071090	12	25351.577448/2011-29	7908346901179	17908346901176	0,89	10,69	34x26x26 cm	0,023

Álcool Absoluto Prolink

ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO

O ÁLCOOL ABSOLUTO PROLINK é um produto especialmente desenvolvido para uso na limpeza em geral dos estabelecimentos de assistência à saúde humana e animal. Também utilizado como veículo para formulação de cosméticos e produtos farmacêuticos. Seu componente ativo não é corrosivo, não deixa resíduos, odor característico alcoólico, sendo sua aplicação simples e de uso cotidiano pelos profissionais de saúde em geral.

Uso: Assistência à Saúde.



Uso para limpeza de estabelecimentos de assistência à saúde



Frasco Anatômico

USO PARA LIMPEZA EM GERAL EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ANIMAL.

PERIGO: PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO INSTITUCIONAL. PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto

Modo de Uso

Proceder a aplicação do produto puro, aplicar o produto com um pano limpo sobre a superfície do móvel, piso, vidro, parede, etc., que desejar limpar. Deixar o produto secar naturalmente.

Armazenamento

Conserve o produto em local seguro e protegido do calor. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Evitar contato do produto com material sensível ao álcool. Não é indicado para uso em acrílicos. Pode enrijecer borrachas e tubos plásticos. Recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados, tais como luvas, máscara, óculos de proteção e avental.

Precauções: Não ingerir. Manter afastado do fogo e do calor. Não perfurar a tampa. Não derramar sobre o fogo. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original. Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.

Primeiros Socorros: Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral à uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Produto inflamável.

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Composição

Componente ativo: Etanol 99,3° INPM ou 99,5° GL.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
00343	1L	SANEANTES	24	22071090	12	25351.414716/2012-83	7908346901186	17908346901183	0,88	10,51	34x26x26 cm	0,023


Isopropanol Prolink

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,7%

O ISOPROPANOL PROLINK é um produto especialmente desenvolvido para uso na limpeza em geral de superfície fixas, componentes elétricos e eletrônicos.



Evaporação Rápida

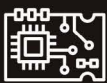

Limpa Placas de Circuitos e Mecanismos Eletrônicos



Remove Oleosidade



Frasco Anatômico

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto

Modo de Uso

Umedecer um pano limpo e seco com uma pequena quantidade de Isopropanol Prolink e aplicar no local a ser limpo. Deixar o produto secar naturalmente.

Armazenamento

Mantenha o produto em sua embalagem original. Conserve a embalagem sempre fechada, em local arejado e protegida do fogo, do sol e do calor. Armazenar o produto longe de alimentos. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Restrito ao uso profissional. Não usar em superfícies sensíveis ao álcool isopropílico. Produto não recomendado para desinfecção. Produto não indicado para queima. Recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados, tais como luvas, máscara, óculos de proteção e avental.

Precauções: Não ingerir. Manter afastado do fogo e do calor. Não perfurar a tampa. Não derramar sobre o fogo. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original. Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.

Primeiros Socorros: Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral à uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Produto inflamável.

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Composição

Componente ativo: Isopropanol 99,7%.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
00342	1L	SANEANTES	24	29051220	12	25351.395572/2012-59	7908346901568	17908346901565	0,87	10,44	34x26x26 cm	0,023

Cloro link 1%

HIPOCLORITO DE SÓDIO 10.000 PPM

O **PROLINK CLORO LINK 1%** é um produto especialmente desenvolvido para desinfecção de superfícies fixas sendo elas de grande extensão, tais como pisos, paredes e mobiliários, e a desinfecção de artigos não críticos sendo eles: objetos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares, que entram em contato superficial com a pele intacta do organismo em ambientes hospitalares, clínicos, farmacêuticos, odontológicos e afins. Possui amplo espectro de atuação, sendo considerado em testes laboratoriais, satisfatório na eficácia bactericida frente à *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Salmonella choleraesuis*. Composição a base de hipoclorito de sódio com 1% de cloro total estabilizado, atuando como elemento oxidativo em cadeias proteicas dos microorganismos.

Uso: Assistência à Saúde.



Atividade antimicrobiana



Aplicação simples



Eficácia contra bactérias:

Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella Enterica



Pronto uso

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto



Frasco Anatômico

Modo de Uso

Superfícies Fixas: lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto puro deixando em contato por 10 minutos.

Artigos não críticos: lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergir os artigos no produto puro deixando-o por 10 minutos. Retirar, enxaguar e secar os artigos. Utilizar o mais breve possível. Não aplicar em superfície aquecida.

Armazenamento

Conserve o produto em local seguro e protegido do calor excessivo. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Não misturar com outros produtos principalmente a base de amônia. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados, tais como luvas, máscara, óculos de proteção e avental. Contém produto fortemente alcalino – Hipoclorito de Sódio.

Precauções: Não ingerir. Manter afastado do fogo e do calor. Não perfurar a tampa. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original e armazenado em local seguro. Proteger do calor.

Primeiros Socorros: **PERIGO! PRODUTO CORROSIVO.** Pode ser fatal se inalado ou absorvido pela pele. Causa queimaduras graves em contato com os olhos, pele e mucosas. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral à uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 0800 148 110.

Tratamento específico. Contém: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Componente ativo: Hipoclorito de Sódio 10.000 ppm (1,0%).

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPLX LARGXALT)	CUBA. DA CX.
08568	1L	SANEANTES	18	38089429	12	326100035	7908346903562	17908346903569	1,12	13,43	34x26x26 cm	0,023
08569	5L	SANEANTES	18	38089429	4	326100035	7908346903579	17908346903576	5,54	22,17	37,5x28,5x29,5 cm	0,032

SANEANTES

Zymedet Gold 5 enzimas

DETERGENTE ENZIMÁTICO

O **ZYMEDET GOLD 5 enzimas** é um detergente enzimático indicado especificamente para a limpeza de instrumental cirúrgico, artigos médicos e odontológicos, manualmente e ou através de lavadoras automáticas de limpeza, com a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos. Contém álcool isopropílico. Produto de acordo com as regulamentações da ANVISA.

Uso: Assistência à Saúde.



5 enzimas



Pouca formação
de espuma



Limpeza manual
e automatizada



Diluição única
1ml/L

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto



5 ENZIMAS

AMILASE

LIPASE

PROTEASE

CARBOHIDRASE

PEPTIDASE

Frasco
Anatômico

FICHA TÉCNICA

Modo de Uso

Para limpeza manual ou em lavadoras automáticas, diluir o produto na proporção de 1ml para 1000ml (1L) de água (1:1000). Utilizar preferencialmente água deionizada ou que atenda: pH 6,0 a 8,5, condutividade máxima: 150 µS/cm e dureza máxima: 100 mg/L CaCO3. A solução deverá estar em temperatura de 35° a 45°C, e o dispositivo médico a ser limpo deverá permanecer submerso nesta solução por 5 minutos. Se necessário, friccionar os instrumentos/artigos. Retirar o material da solução e enxaguar abundantemente em água corrente. Este produto pode ser utilizado na limpeza manual, em máquinas de limpeza automáticas, desde que previamente testados. UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO. NÃO REUTILIZAR A SOLUÇÃO DE LIMPEZA.

Armazenamento

Conserve o produto em local seguro e protegido do calor excessivo. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Não misturar com outros produtos. Recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados, tais como luvas, máscara, óculos de proteção e avental.

Precauções: Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original. Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.

Primeiros Socorros: Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundancia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Disque Intoxicações: 0800-722-6001

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Protease, amilase, lipase, protease subtilisin (Peptidase), carbohidrase, nonil fenol etoxilado, estabilizantes, solventes orgânicos, alcalinizante, corante, conservante e veículo

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
08793	1L	SANEANTES	24	35079019	12	326100036	7908346903593	17908346903590	1,08	12,96	34x26x26 cm	0,023
08792	5L	SANEANTES	24	35079019	4	326100036	7908346903609	17908346903606	5,35	21,40	37,5x28,5x29,5 cm	0,032

Zymedet Extra 7 enzimas

DETERGENTE ENZIMÁTICO

O **ZYMEDET EXTRA 7 ENZIMAS** é um **DETERGENTE MULTIENTZIMÁTICO** atuante com 7 enzimas compostas por protease, amilase, lipase, mananase, peptidase, carbohidrase e celulase que combinados com tensoativos de baixa espuma tem ação de limpeza eficiente, sendo indicado especificamente para a limpeza de instrumentos cirúrgicos, artigos médicos e odontológicos, manualmente e/ou através de lavadoras automáticas de limpeza, como lavadoras termodesinfetadoras e ultrassônicas. Tem a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos em locais de difícil limpeza e com pouca formação de espuma.



7 enzimas



Não Espumante



Limpeza manual e automatizada

Diluição única
1ml/L

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto

7 ENZIMAS

PROTEASE

CELULASE

PEPTIDASE

MANANASE

CARBOHIDRASE

LIPASE

AMILASE

Frasco
Anatômico

Modo de Uso

Limpeza Manual: Em um recipiente limpo, diluir o produto previamente em água. A diluição deverá ser de 1 ml do produto para 1000 ml (1L) de água (1:1000). Cada 1 ml de produto rende 1001 ml de solução pronta para limpeza. Deixar agir por 5 minutos, e se necessário friccionar os instrumentos/ artigos com as mãos vestidas de luvas látex, retirar o material da solução e enxaguar com água em abundância. **Limpeza automatizada:** Este produto pode ser utilizado em máquinas de limpeza ultrassônicas ou termodesinfetadora desde que previamente testados. Para isso, proceder conforme descrito: Diluir ou programar a diluição do produto. A diluição deverá ser de 1 ml do produto para 1000 ml (1L) de água (1:1000). Cada 1 ml de produto rende 1001 ml de solução pronta para limpeza, deixar agir por 5 minutos ou seguir as instruções do fabricante do equipamento. Na sequência enxaguar com água em abundância.

Armazenamento

Conservar em temperatura ambiente. Proteger da luz, do calor e da umidade em excesso.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Não misturar com outros produtos. Recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados, tais como luvas, máscara, óculos de proteção e avental.

Precauções: Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original. Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.

Primeiros Socorros: Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Disque Intoxicações: 0800-722-6001

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Protease, Protease (Peptidase Subtilisin), Amilase, Lipase, Mananase, Celulase, Carboidrase, Hexil D-Glipiranosídeo (2,4% p/p), 2-Etilexanol etoxilato (2,4% p/p), estabilizantes, alcalinizantes, solventes, conservantes, tensoativos, tamponante, umectante, emulsificante, atenuador de espuma, corante e veículo. Faixa de pH do produto puro 6,0 - 8,5.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPLARGXALT)	CUBA. DA CX.
08974	1L	SANEANTES	24	35079019	12	326100037	7908346903760	17908346903767	1,08	12,96	34x26x26 cm	0,023
08973	5L	SANEANTES	24	35079019	4	326100037	7908346903777	17908346903774	5,35	21,40	37,5x28,5x29,5 cm	0,032

SeptPro Plus

QUATERNÁRIO DE AMÔNIO

O **SEPTPRO PLUS** é um produto especialmente desenvolvido para desinfecção hospitalar de nível intermediário e também de superfícies fixas e artigos não críticos. Possui uma formulação exclusiva, composta por um *blend* de moléculas de quaternários de amônio de quinta geração com biguanida, pronto para uso, que garantem eficácia sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. Ideal para uso hospitalar, casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes, móveis e artigos não críticos. Sua aplicação segura pode ser em acrílicos, vidros, revestimento, inox, metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos PVC, vinil, látex, monitores, tela de LCD, bombas de infusão, incubadoras, transdutores, etc.

Possui amplo espectro de atuação, sendo considerada em testes laboratoriais satisfatório, na eficácia bactericida frente à *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*, *E. coli*, *Trichophyton interdigitate*, *Candida albicans*, *Mycobacterium segmentalis*, *Mycobacterium bovis*. **Uso: Assistência à Saúde.**



Desinfecção Hospitalar de Nível Intermediário



Formulação Exclusiva e Potente



Pronto para Uso



Compatível com Diversos Materiais



Versatilidade de Aplicação



Ideal para Diversos Ambientes e Contextos de Saúde

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto

Gatilho spray/espuma



Frasco Anatômico

Modo de Uso

Produto pronto uso. PH Neutro.

Para desinfecção de artigos de nível intermediário: lavar, enxaguar e secar os materiais de inaloterapia e assistência ventilatória. Imergir os materiais no produto puro, deixando em contato por 30 minutos. Enxaguar e secar os materiais. Utilizar o mais breve possível.

Para artigos não críticos: após limpeza, fazer imersão do material e deixar por 10 minutos, retirar e enxaguar e secar.

Para desinfecção de superfícies fixas: remover matéria orgânica e sujidades. Aplicar o produto com pano ou mop deixando em contato por 10 minutos.

Armazenamento

Manter o frasco em local fresco, protegido de sol e calor. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Não misturar com outros produtos, principalmente compostos clorados e tensoativos aniônicos, sob risco de INATIVAR ou prejudicar ação do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias.

Precauções: Usar equipamentos de proteção individual adequados tais como: luvas, máscaras, óculos de proteção e avental. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele, lave os objetos e utensílios usados, como medida antes de reutilizá-los.

Primeiros Socorros: Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço Médico mais próximo, levando o rótulo do produto. (DISQUE INTOXICAÇÕES: 0800-722-6001). Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e chame socorro médico, nunca dê nada via oral a uma pessoa inconsciente.

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Composição

Mistura de tensoativos catiônicos, biguanida, surfactante e água.

Princípios Ativos: Mistura de tensoativos catiônicos 0,60% p/p. Cloreto de polihexametileno biguanida 0,1% p/p.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
06303	750ML	SANEANTES	24	38089429	6	326100034	7908346900318	17908346900315	0,84	5,03	22,5x21,5x28 cm	0,014
06305	1L	SANEANTES	24	38089429	12	326100034	7908346900325	17908346900322	1,08	12,92	34x26x26 cm	0,023
06306	5L	SANEANTES	24	38089429	4	326100034	7908346900332	17908346900339	5,28	21,12	37,5x28,5x29,5 cm	0,032

Septhex Gard
ENXAGUATÓRIO BUCAL

GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%

O **ENXAGUATÓRIO BUCAL PROLINK**, foi desenvolvido com digluconato de clorexidina 0,12%, e componentes que reduzem e previnem a formação de placa bacteriana, protege às gengivas e as mantém saudáveis, além de combater o mau hálito. Tem eficácia comprovada. Não contém álcool. Indicado quando a limpeza mecânica dos dentes com a escovação não é possível ou indicada. Foi realizado o teste para *as bactérias Staphylococcus aeurus, Staphylococcus epidemidis, Staphylococcus oralis que atuam como agente antimicrobiano e forma uma barreira que impede a proliferação de 99,99% das bactérias.



Mata 99,99% das bactérias



Dentes mais limpos com frescura.



Reduz placa bacteriana e a formação de placa.



Previne gengivite e mantém gengivas saudáveis.

SEGUIMENTO



Hospitalar



Odonto



Modo de Uso

Fazer bochecho com o conteúdo de uma tampa da solução (15 mL), sem diluir, por 30 a 45 segundos pela manhã e à noite ou conforme orientação do seu dentista. Não ingerir ou fazer bochechos com água ou outros líquidos após o uso do produto.

Armazenamento

Conservar em temperatura ambiente. Proteger da luz, do calor e da umidade em excesso.

Precauções e Advertências no Uso

Use somente em bochechos. Uso externo. Não ingerir. Use somente sob recomendação do seu dentista. Podem ocorrer manchas nos dentes e em restaurações observáveis após o uso prolongado do produto. Este tempo varia de pessoa para pessoa. Estas manchas são externas e podem ser removidas com profilaxia profissional. Pode ocorrer perda temporária de paladar que retorna após interrupção do uso. **Uso externo.**

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol, Chlorhexidine Digluconate, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Eugenol, Sodium Cyclamate, CI 42090, Citric Acid, Phenoxyethanol. Composição (português): Água, Glicerol, Propileno Glicol, Sorbitol, Digliconato de Clorexidina, Óleo de Rícino Hidrogenado Peg-40, Aroma, Eugenol, Ciclamato de Sódio, Corante Azul Brilhante 42090, Ácido Cítrico, Fenoxietanol.

Composição (português): Água, Glicerol, Propileno Glicol, Sorbitol, Digliconato de Clorexidina, Óleo de Rícino Hidrogenado Peg-40, Aroma, Eugenol, Ciclamato de Sódio, Corante Azul Brilhante 42090, Ácido Cítrico, Fenoxietanol.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
08938	250ML	COSMÉTICO	24	33069000	12	25351.324850/2024-27	7908346903708	17908346903705	0,29	3,48	26,2x20x14,5x cm	0,008
08937	1L	COSMÉTICO	24	33069000	12	25351.324850/2024-27	7908346903722	17908346903729	1,07	12,84	34x26x26 cm	0,023

Septpro 70 Álcool Prolink

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM

O **SEPTPRO ÁLCOOL PROLINK** é uma solução a base de álcool etílico 70% INPM, indicado na antisepsia da pele. Possui amplo espectro de ação, sendo considerado em testes laboratoriais satisfatório na eficácia bactericida frente à *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli*. Seu componente ativo não é corrosivo, não deixa resíduos, sendo sua aplicação simples e de uso cotidiano pelos profissionais de saúde. USO TÓPICO. CONTÉM DESNATURANTE: BENZOATO DE DENATONIUM.

Uso: Assistência à Saúde.

Solução alcoólica a 70% INPM, ideal para a antisepsia eficaz da pele.

Garante suavidade e delicadeza nas mãos



SEGUIMENTO

- Hospitalar
- Veterinário
- Odonto

Modo de Uso

Uso tópico, aplicar o produto sobre a pele, na área a ser feita a higienização, espalhando-o suavemente até completa absorção.

Armazenamento

Conservar em lugar fresco, temperatura abaixo de 40°C. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: O produto não deve ser aplicado em pele irritada ou com feridas.
Precauções: Não ingerir. Manter afastado do fogo e do calor. Não derramar sobre o fogo. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.
Primeiros Socorros: Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral à uma pessoa inconsciente.
Produto inflamável. Uso externo.

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Aqua, Alcohol, Glycerin, Denatonium Benzoate.

COMPOSIÇÃO (PORTUGUÊS): Água, Álcool Etílico, Glicerol, Benzoato de Denatônio.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
08944	100ML	COSMÉTICO	24	38089429	30	25351.432112/2024-52	7908346900172	17908346900407	0,11	3,18	26x21,5x16,5 cm	0,009
08945	250ML	COSMÉTICO	24	38089429	12	25351.432112/2024-52	7908346900394	17908346900391	0,26	3,11	23x17,5x20 cm	0,008
08946	1L	COSMÉTICO	24	38089429	12	25351.432112/2024-52	7908346900554	17908346900551	0,95	11,41	34x26x26 cm	0,023

SeptProGel 70°

Gel antisséptico

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM

O **SEPTPRO GEL 70°** é um produto desenvolvido para a higienização das mãos. Sua formulação possui componente que garante a suavidade e a maciez das mãos no seu uso diário.



Mata 99,99% das bactérias



Garante suavidade e delicadeza nas mãos



Suaviza e refresca a pele



Dermatologicamente testado

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto



Frasco Anatômico

Modo de Uso

Deve ser aplicado nas mãos uma pequena quantidade do SeptPro Gel 70 e em seguida esfregar a mesma até secar, dispensando a utilização de água e toalha.

Armazenamento

Conservar em lugar fresco, temperatura abaixo de 40°C. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: O produto não deve ser aplicado em pele irritada ou com feridas. Testado Dermatologicamente.
Precauções: Não ingerir. Manter afastado do fogo e do calor. Não derramar sobre o fogo. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.
Primeiros Socorros: Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral à uma pessoa inconsciente.
Produto inflamável. Uso externo.

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Aqua, Alcohol, Carbomer, Glycerin, Denatonium Benzoate, Triethanolamine.

Composição (português): Água, Álcool Etílico, Carbômer, Glicerol, Benzoato de Denatônio, Trolamina.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
03948	90g/100ml	COSMÉTICO	36	38089429	30	296960001	7908346901513	17908346901510	0,09	2,70	26x21,5x16,5 cm	0,009
03947	440g/500ml	COSMÉTICO	36	38089429	12	296960001	7908346900233	17908346900230	0,51	6,10	30,5x23,5x19,5 cm	0,014
03944	875g/1L	COSMÉTICO	36	38089429	12	296960001	7908346901537	17908346901534	0,96	11,57	34x26x26 cm	0,023
03941	4,4kg/5L	COSMÉTICO	36	38089429	4	296960001	7908346901506	17908346901503	4,68	18,72	37,5x28,5x29,5 cm	0,032

SeptDerm
Erva doce

SABONETE LÍQUIDO

O **SEPTDERM ERVA DOCE** é um sabonete elaborado com matérias primas de alta qualidade, a fim de proporcionar uma excelente limpeza nas mãos, rosto e corpo. O mesmo possui um pH neutro com uma suave fragrância de erva doce proporcionando uma sensação de maciez e bem estar à pele.

pH neutro

Sensação de maciez e limpeza

Suaviza e refresca a pele

Dermatologicamente testado

SEGUIMENTO

- Hospitalar
- Veterinário
- Odonto



Frasco Anatômico

Modo de Uso

Umidecer as mãos e aplicar uma pequena quantidade do produto, friccionar em movimentos para que o sabonete SeptDerm Erva doce se espalhe proporcionando uma boa limpeza, enxaguar. No banho adicionar o sabonete em uma esponja, esfregando ao corpo a fim de obter uma excelente homogeneização.

Armazenamento

Conserve o produto em local seguro e protegido do calor excessivo. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Uso externo. O produto não deve ser aplicado em pele irritada ou com feridas.
Precauções: Não ingerir. Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.
Primeiros Socorros: Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral à uma pessoa inconsciente.
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 0800 148 110.

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Aqua, Disodium Edta, Sodium laureth sulfate, Cocamide DEA, Parfum, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone + Methylisothiazolinone, CI 19140 E CI 42090.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENÇÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
04018	500ML	COSMÉTICO	36	34012010	12	25351.200361/2018-32	7908346901193	17908346901190	0,58	6,94	30,5x23,5x19,5 cm	0,014
03826	1L	COSMÉTICO	36	34012010	12	25351.200361/2018-32	7908346901209	17908346901206	1,09	13,08	34x26x26 cm	0,023
03806	5L	COSMÉTICO	36	34012010	4	25351.200361/2018-32	7908346901223	17908346901220	5,19	20,76	37,5x28,5x29,5 cm	0,032

SeptHex
Dermo Suave

CLOREXIDINA 0,2%

O **SEPTHEX DERMO SUAVE** é um produto desenvolvido para higienização e antissepsia da pele. Sua formulação possui componentes que complementam o asseio corporal com suavidade. Solução aquosa antisséptica a base de digluconato de clorexidina 0,2%. Produto dermatologicamente testado.
Uso: Assistência à Saúde.



Antisséptico



Antissepsia da pele
(higienização
preventiva)

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto



Frasco
Anatômico

Modo de Uso

Aplicar o produtos puro sobre a pele integra, com o auxílio de algodão ou gaze.

Armazenamento

Conserve em temperatura ambiente. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Uso externo. O produto não deve ser aplicado em pele irritada ou com feridas. Não aplicar nos olhos. Em caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula, suspender o uso.
Precauções: Não ingerir. Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.
Primeiros Socorros: Em caso de aplicação acidental na pele ferida ou irritada, ou em contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral à uma pessoa inconsciente.

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Aqua, Glycerin, Chlorhexidine Digluconate, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol.

COMPOSIÇÃO (PORTUGUÊS): Água, Glicerol, Digliconato de Clorexidina, Óleo de Rícino Hidrogenado PEG-40, Fenoxietanol.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
08720	100ML	COSMÉTICO	24	29252923	30	25351.290535/2018-41	7908346901247	17908346901244	0,11	3,21	26x21,5x16,5 cm	0,009
08721	1L	COSMÉTICO	24	29252923	12	25351.290535/2018-41	7908346901230	17908346901237	1,09	13,06	34x26x26 cm	0,023

COSMÉTICOS

SeptHex
Clorexidina

SABONETE DE CLOREXIDINA

O **SEPTHEX CLOREXIDINA** é uma solução degermante a base de clorexidina, com ação antisséptica para higienização das mãos, braços e antebraços. Indicado para médicos, enfermeiros(as), farmacêuticos e demais profissionais da área da saúde.
Uso: Assistência à Saúde.



Antisséptico



Dermatologicamente
Testado

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto



Bico
Dosador

FICHA TÉCNICA

Modo de Uso

Umedecer a pele, aplicar uma quantidade de septhex clorexidina e friccionar até a formação de espuma. Enxaguar. Repetir a aplicação e enxaguar.

Armazenamento

Conservar em lugar fresco, afastado de luz e calor em excesso. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Uso externo. O produto não deve ser aplicado em pele irritada ou com feridas. Não aplicar nos olhos. Em caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula, suspender o uso.
Precauções: Não ingerir. Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.
Primeiros Socorros: Em caso de aplicação acidental na pele ferida ou irritada, ou em contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral à uma pessoa inconsciente.

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Aqua, Chlorhexidine Digluconate, Glycerin, Methylisothiazolinone + Methylchloroisothiazolinone, Alcohol, Hydroxyethylcellulose, CI19140, Lauramine Oxide, Myristamine Oxide, Citric Acid, Parfum.

Composição (português): Água, digliconato de clorexidina, Glicerol, Metilcloroisotiazolinona + Metilisotiazolinona, Álcool Etílico, hidroxiethylcelulose, amarelo 19140, óxido de lauramina, óxido de miristamina, Ácido Cítrico Monoidratado, Fragrância. (DISQUE INTOXICAÇÕES: 0800-722-6001).

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
05069	100ML	COSMÉTICO	36	29252923	30	25351.187227/2019-10	7908346901438	17908346901435	0,12	3,69	26x21,5x16,5 cm	0,009
05070	1L	COSMÉTICO	36	29252923	12	25351.187227/2019-10	7908346901421	17908346901428	1,09	13,06	34x26x26 cm	0,023

Óleo de Girassol

ÓLEO HIDRATANTE PARA O CORPO

O **OLEO DE GIRASSOL** é indicado para hidratar pele evitando ressecamento (pode ser utilizado para prevenção de escaras), pois é altamente emoliente e traz os benefícios revitalizantes do óleo de copaíba, propriedades antioxidantes da vitamina E, e os ácidos graxos essenciais do óleo de girassol.



Auxilia na cicatrização



Função antisséptica e anti-inflamatória



Ótima absorção e hidratação



Não pegajoso

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto



Bico Dosador

Modo de Uso

Aplicar na pele íntegra duas a três vezes ao dia, quantidade suficiente para espalhar no local e massagear até absorção da pele.

Armazenamento

Mantenha fora do alcance de crianças e ao abrigo da luz solar e do calor. Obedecer a indicação de empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Uso externo. Em caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula, suspender o uso.
Precauções: Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.
Primeiros Socorros: Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Para uso durante a gravidez consulte um médico.

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Helianthus Annuus Seed Oil, BHT, Caprylic/Capric Triglyceride, Copaifera Reticulata Balsam Oil, Lecithin, Propylparaben, Tocopheryl Acetate, Glycine Soja Oil.
Composição (português): Óleo de Girassol, Butil-Hidroxitolueno, Triglicerídeos dos Ácidos Cáprico e Caprílico, Copaifera Reticulata Ducke, Lecitina, Propilparabeno, Acetato de Dextroalfatocoferol, Óleo de soja.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
05251	100ML	COSMÉTICO	18	15121919	30	25351.135320/2019-49	7908346901469	17908346901466	0,11	3,33	26x21,5x16,5 cm	0,009
07822	200ML	COSMÉTICO	18	15121919	12	25351.135320/2019-49	7908346903296	17908346903293	0,22	2,634	23x17,5x20 cm	0,008

Creme Barreira

CREME DERMOPROTETOR RESTAURADOR

O Creme Barreira Prolink fortalece a defesa natural da pele, formando um filme dermoprotetor que previne o ressecamento e a desidratação. Com ação restauradora, ajuda a manter a integridade da barreira cutânea, protegendo contra agentes externos. Indicado para todos os tipos de pele.



 Fortalecimento da barreira cutânea

 Redução da perda de água

 pH Balanceado

 Dermatologicamente testado

SEGUIMENTO

 Hospitalar

 Veterinário

Modo de Uso

Aplicar uma pequena quantidade do Creme Barreira sobre a pele limpa e seca. Espalhe delicadamente e massageie até completa absorção.

Armazenamento

Conservar em temperatura ambiente. Proteger da luz, do calor e da umidade em excesso.

Precauções e Advertências no Uso

Evitar contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se houver irritação suspenda o uso e procure orientação médica. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não ingerir. Uso externo. **CONSERVAÇÃO:** Conservar em temperatura ambiente. Proteger da luz, do calor e da umidade em excesso.

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Aqua, Ceteareth-20, Disodium EDTA, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Trimethylsiloxysilicate, Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Calendula Officinalis Flower Extract, Glycerin, Caprylyl Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Extract.

COMPOSIÇÃO (PORTUGUÊS): Água, Cetearete-20, Edetato Dissódico, Pentaeritritil Tetra-Di-T-Butil Hidroxi-Hidrocinamato, Monoestearato de Glicerila, Alcool Cetearílico, Fenoxietanol, Caprililglicol, Propileno Glicol, Goma Xantana, Petrolato, Parafina Líquida, Decametilciclopentasiloxano, Estearato de Octila, Triglicerídeo Caprílico/Cáprico, Octenilsuccinato de Amido Alumínio, Trimetilsiloxissilicato, Dimeticona, Acetato de Tocoferila, Extrato de Calêndula, Glicerol, Caprililglicol, Extrato da Folha de Aloe Vera.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPXLARGXALT)	CUBA. DA CX.
09057	60G	COSMÉTICO	24	33049990	30	25351.032847/2025-61	7908346903838	17908346903835	0,60	0,94	13x13x16 cm	0,003



site: prolinkquimica.com.br
instagram: [prolinkquimica](https://www.instagram.com/prolinkquimica)