

ÁLCOOL 70

Álcool Etílico 70% INPM

Desinfecção
Hospitalar

DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

Solução a

Álcool Etílico 70% (p/p)
Álcool Etílico 70% INPM

70%

Uso hospitalar
Assistência à saúde

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.
CUIDADO! IRRITANTE PARA OS OLHOS.
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL.
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.
CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

O Álcool Etílico 70% VIC PHARMA é um desinfetante hospitalar indicado para superfícies fixas e artigos não-críticos podendo ser utilizado em hospitais, casas de saúde, ambulatórios, estabelecimentos de assistência à saúde e consultórios odontológicos. **MODO DE USAR:** Para abertura da embalagem: Rompa o lacre e gire a tampa em sentido anti-horário. Superfícies fixas em geral: Primeiramente deve-se lavar, enxaguar e secar a superfície removendo toda sujidade e na sequência aplique o Álcool 70% VIC PHARMA na superfície deixando agir por 10 minutos. Não é necessário enxaguar na sequência. Artigos não-críticos: Lave o artigo para remover todo o tipo de sujidade, enxágue e deixe secar, e em seguida mergulhe o artigo no Álcool 70% VIC PHARMA, no tempo de contato de 10 minutos. Utilizar o artigo o mais breve possível. **CONTRA INDICAÇÕES DE USO:** Não aplicar em acrílico ou materiais sensíveis a álcool, podendo entijetar borrachas e plásticos no geral. Danifica lentes em geral dos equipamentos. **COMPOSIÇÃO:** Álcool etílico 96% GL e água. Princípio ativo: Álcool etílico 70%. **PRECAUÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ADVERTÊNCIAS:** Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos. **CUIDADO!** Irritante para os olhos. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não ingerir. Não perfurar a embalagem. Não aplicar próximo a chamas. Proibido reutilizar a embalagem. Não expor a temperatura superior a 50°C. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Disk Intoxicação (CEATOX) - 0800.772.6001. Em caso de ingestão acidental - não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. **PERIGO!** Causa danos se ingerir, comer, beber ou fumar durante a aplicação. Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas.

REGISTRO: 15 N°:
AUTORIZAÇÃO DE FUNC. ANVISA: AFE/MS No 3 02 648-B
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Celia R.R.O. Sassi - CRF SP: 14.185
FABRICADO POR:
VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
R: GERALDO ROSA, 62 - DISTRITO INDUSTRIAL
TAQUARITINGA - SP
CNPJ: 39.032.974/0001-92
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Água pode faltar. Não desperdice.

USO PROFISSIONAL

Conteúdo 5L

VALIDADE: 24 meses à partir da data de fabricação.
Lote e fabricação impressos na embalagem.

PERIGO
PRODUTO INFLAMMÁVEL



INFLAMMABLE

MANUTENHA AFASTADO DO FOGO
E DO CALOR.
NÃO PERFURE A EMBALAGEM.
NÃO GUARDE SOBRE O FOGO

ATENÇÃO

MANTENHA FORA DO ALCANCE
DE CRIANÇAS E
ANIMAIS DOMÉSTICOS



EM CASO DE INGESTÃO
ACIDENTAL, PROCURAR UM
MÉDICO IMEDIATAMENTE



7 1897877 705205

SAC: 0800 606 8134
sac@vicpharma.com.br

EA 889/04